

## **TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ):

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG**

Địa chỉ: Số 32/36 đường ĐX 031, KP7, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH HOÁ DƯỢC AERO CHEMIE

Địa chỉ: Số 19, Đường Phúc Hậu , Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

<b>STT</b>	<b>Đề mục</b>	<b>Nội dung mô tả tóm tắt</b>
<b>1</b>	<b>Mô tả chung loại trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên trang thiết bị: <b>DUNG DỊCH XỊT MŨI</b> Chủng loại/Mã sản phẩm: <b>HEALTH GOLD FOREVER</b> Thành phần gồm: Xuyên tâm liên, Keo ong xanh, Hoa Hòe, Gừng, Sả, Hoàng bá, Natri Benzoat, Sorbitol, Glycerin, Mật ong, Nước tinh khiết.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Chai/lọ: 15ml/20ml/30ml/50ml/70ml/80ml/100ml/120ml/150ml/200ml/230ml/250ml/300ml.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	- Giúp làm sạch khoang mũi, loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy, duy trì độ ẩm cho niêm mạc mũi, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho mũi, giảm nghẹt mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở. - Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm, phòng ngừa và làm giảm triệu chứng: sổ mũi, ngạt mũi, viêm VA, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, cúm do virus gây nên, cúm mùa.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<b>Hướng dẫn sử dụng</b> Bước 1: Mở nắp bảo vệ đầu van nhấn. Bước 2: Tháo nắp bảo vệ đầu xịt.

		<p>Bước 3: Đưa đầu vòi phun vào trong mũi, ấn nhẹ, dứt khoát để dung dịch đi tới vị trí mong muốn. Mỗi lần xịt ấn van 1-2 lần.</p> <p>Người lớn và trẻ em trên 1 tuổi: mỗi ngày xịt 2-4 lần.</p> <p>Trẻ em dưới 1 tuổi: tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ trước khi sử dụng.</p>
1.5	Chống chỉ định	Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<p>Không sử dụng cho người dị ứng với các sản phẩm từ ong hay phấn hoa.</p> <p>Ngưng sử dụng sản phẩm khi có các dấu hiệu kích ứng như sưng tấy miệng, cổ họng.</p>
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
<b>2</b>	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):</b> Không có	
<b>3</b>	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có):</b> Không có	
<b>4</b>	<b>Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:</b> Không có	

Bình Dương, ngày 23 tháng 07 năm 2021

  
 Nguyễn Văn Trọng