

Tên sản phẩm:

Trang thiết bị chẩn đoán In -vitro - Cống phản ứng phát quang dùng cho máy phân tích miễn dịch

Đây là sản phẩm loại sử dụng 1 lần.

Các sai lệch phân tích do sử dụng nhiều lần không được bảo hành trong thời gian bảo hành của sản phẩm này.

Thành phần của sản phẩm này: 1000 cống phản ứng mỗi bọc, hộp 1 bọc/hộp mã 15910/10 hoặc hộp 2 bọc/hộp mã 15910/11, sau khi nạp vào máy, sử dụng 1000 cống đo, máy sẽ báo nạp cống phản ứng mới.

Khuyến cáo nạp cả bọc khi sử dụng.

Không nên sử dụng cống phản ứng trong thời gian dài sau khi mở bọc để tránh ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.

Cống phản ứng đã sử dụng phải được xử lý theo các quy định có liên quan của địa phương về chất thải nhựa sau khi đã khử nhiễm.

REACTION VESSELS HUMACLIA SR

Package Size

[REF]	15910/10	1x1000 pcs	REACTION VESSELS HUMACLIA SR
	15910/11	2x1000 pcs	REACTION VESSELS HUMACLIA SR

[IVD]

Intended Use

In a HumaCLIA 150 test, a chemical reaction occurs in a vessel called a reaction well.

The Reaction Vessels HumaCLIA SR is a reaction well designed to be compatible with HumaCLIA 150 series immunoassays for sample and reagents.

Contents

15910/10	1 bag x 1000 pcs plastic well/bag
15910/11	2 bags x 1000 pcs plastic well /bag

Preparation

The Reaction Vessels HumaCLIA SR is ready for use and can directly be added on the HumaCLIA 150.

Add Reaction Vessels to the HumaCLIA 150

Check whether the quantity of vessels in the vessel loading area of HumaCLIA 150 is sufficient. If not, add new vessels into the vessel loading area (up to 1000 pcs) on the HumaCLIA 150.

Storage and Stability

The Reaction Vessels HumaCLIA SR stable up to the stated expiry date when stored at 3...30°C.

Precautionary statements

P234 Keep only in original bag.

P281 Use personal protective equipment as required.

P401 Store in accordance with local/regional/national/international regulations.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

REACTION VESSELS HUMACLIA SR

Đóng gói

[REF]	15910/10	1x1000 giếng	REACTION VESSELS HUMACLIA SR
	15910/11	2x1000 giếng	REACTION VESSELS HUMACLIA SR

[IVD]

Mục đích sử dụng

Trong một thử nghiệm HumaCLIA 150, một phản ứng hóa học xảy ra trong một giếng được gọi là giếng phản ứng.

Reaction Vessels HumaCLIA SR là giếng phản ứng được thiết kế tốt để tương thích với xét nghiệm miễn dịch dòng HumaCLIA 150 cho chứa mẫu và thuốc thử.

Thành phần

15910/10	1 túi x 1000 giếng bằng nhựa/túi
15910/11	2 túi x 1000 giếng bằng nhựa/bag

Chuẩn bị

Reaction Vessels HumaCLIA SR sẵn sàng sử dụng và được nạp thêm trực tiếp vào máy HumaCLIA 150.

Nạp Reaction Vessels vào máy HumaCLIA 150

Kiểm tra khu vực nạp giếng trên máy HumaCLIA 150 xem có đủ số lượng giếng không. Nếu không đủ, nạp thêm giếng vào khu vực nạp giếng (lên đến 1000 giếng) trên máy HumaCLIA 150

Bảo quản và độ bền

Reaction Vessels HumaCLIA SR bền đến hạn dùng khi bảo quản ở 3...30°C.

Cảnh báo thận trọng

P234 Giữ nguyên trong túi gốc.

P281 Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân khi được yêu cầu.

P401 Lưu trữ phù hợp với các quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

P501 Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

VESSELS

INF15910/10, 11 E-V

09-2020-02

