

- Tên trang thiết bị y tế: **Trang thiết bị chẩn đoán In -vitro - Ống bảo quản thuốc thử**
- Chủng loại: **Chimney**
- Mã sản phẩm: 16661/01

#### Hướng dẫn sử dụng

Chimney (16661/01) giảm thiểu sự tiếp xúc của thuốc thử với không khí. Nếu HDSD (Package Insert) của thuốc thử yêu cầu sử dụng Chimney, thì độ ổn định trên bo mạch, độ ổn định hiệu chuẩn và độ ổn định mẫu trắng đã được đánh giá và chỉ có giá trị khi sử dụng với Chimney. Một Chimney phải được sử dụng cho mỗi chai thuốc thử mới. Đưa Chimney vào chai thuốc thử trước khi đặt lọ thuốc thử vào máy. Không tháo Chimney khi đang đóng nắp.



# CHIMNEY

## HumaStar 600

### Package Size

[REF] 16661/01 16 pcs CHIMNEY

[IVD]

### Intended Use

The chimney is designed to be used with the reagent vials of the HumaStar 600, HumaStar 300SR analyzers, for the purpose of reducing air interference to the reagents.

### Contents

16661/01 box of 16 plastic tube

### Preparation

The Chimney is ready for use and can directly insert to the reagent vials HumaStar 600, HumaStar 300SR.

### Storage and Stability

The Chimney is stable up to the stated expiry date when stored at 2...25°C.

### Precautionary statements

P281 Use personal protective equipment as required.

P401 Store in accordance with local/regional/national/international regulations.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

# CHIMNEY

## HumaStar 600

### Đóng gói

[REF] 16661/01 16 pcs CHIMNEY

[IVD]

### Mục đích sử dụng

Chimney được thiết kế để sử dụng với các lọ thuốc thử của máy phân tích HumaStar 600, HumaStar 300SR, nhằm mục đích giảm tác động của không khí đến thuốc thử.

### Thành phần

16661/01 hộp 16 ống nhựa

### Chuẩn bị

Chimney sẵn sàng sử dụng và được cắm trực tiếp vào lọ thuốc thử.

### Bảo quản và độ bền

Chimney bền đến hạn dùng khi bảo quản ở 2...25°C.

### Cảnh báo thận trọng

P281 Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân khi được yêu cầu.

P401 Lưu trữ phù hợp với các quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

P501 Vứt bỏ nội dung / vật chứa theo quy định của địa phương / khu vực / quốc gia / quốc tế.

CHIMNEY

INF16661/01 E-V

02-2020-15



# Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH  
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany  
Telefon +49 6122-9988-0 · Telefax +49 6122-9988-100 · e-Mail human@human.de