

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG
Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ *KHẨU TRANG Y TẾ VG95*

CÔNG DỤNG

Sản phẩm được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) để ngăn ngừa và bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp.

Sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế, các lĩnh vực công nghiệp, điện tử, thực phẩm, đồ uống, phòng sạch... và nhiều lĩnh vực khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

B1: Đưa khẩu trang lên ngang mặt và dùng tay ấn chỉnh thanh nẹp mũi cho vừa vặn với khuôn mặt. Quay mặt gắn 2 đầu dây đeo vào trong.

B2: Đeo khẩu trang bằng cách cầm 2 quai đeo và kéo đặt vào sau tai.

B3: Dùng tay kéo mép trên và dưới cho đến khi khẩu trang che kín từ vùng mũi đến cằm.

THẬN TRỌNG

Luôn sử dụng sản phẩm đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khẩu trang sau khi sử dụng thì cần được phân loại rác hoặc cho vào thùng rác y tế.

Không vứt bỏ khẩu trang đã qua sử dụng bừa bãi tại các khu vực công cộng.

Không tái sử dụng hoặc tiết khuẩn lại sản phẩm đã qua sử dụng.

BẢO QUẢN

Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nhiệt, tránh va chạm cơ học. Không để sản phẩm gần nơi chứa các hóa chất độc hại. Không để vật nặng lên trên sản phẩm gây dập hay gãy, hỏng sản phẩm, vỏ bao bì. Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thông thường.