



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Nhà vườn CH25, Khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tên sản phẩm: **Que lấy dịch tỵ hầu**

Chủng loại: Specimen Collection Swab (Nasal swab)

Hãng sản xuất: **Shandong Chengwu Medical Products Factory**

Xuất xứ: Trung Quốc

Hướng dẫn sử dụng:

1/ Đối với mẫu tỵ hầu:

- Để bệnh nhân ngòì thoải mái, hơi ngửa cổ ra sau 45 độ.
- Đưa tăm bông vào mũi, vừa đẩy vừa xoay tăm bông đi nhẹ vào khoảng ½ độ dài từ cánh mũi đến dái tai cùng phía. Giữ tăm bông không 5 giây.
- Xoay nhẹ về rút tăm bông ra và đựng vào ống môi trường vận chuyên.