



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Nhà vườn CH25, Khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tên sản phẩm: **Que lấy dịch hầu họng**

Chủng loại: Specimen Collection Swab (Throat swab)

Hãng sản xuất: **Shandong Chengwu Medical Products Factory**

Xuất xứ: Trung Quốc

### **Hướng dẫn sử dụng:**

#### **1/Đối với mẫu họng hầu:**

- Tư thế thoải mái, yêu cầu bệnh nhân há miệng to.
- Đưa tăm bông vào vùng hầu họng, miết lấy dịch vùng tế bào họng, xoay tròn nhẹ 3-4 lần để thấm nhiều dịch.
- Đặt que tăm bông đã thấm dịch đựng vào ống môi trường vận chuyển.