



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Nhà vườn CH25, Khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Ống môi trường vận chuyển vi rút

Chủng loại: Disposable Virus Specimen Collection Tube

Hãng sản xuất: Shandong Chengwu Medical Products Factory

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Quy cách đóng gói: Sản phẩm bao gồm một ống chứa môi trường vận chuyển
2. Phạm vi sử dụng: Sử dụng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh nhân
3. Điều kiện bảo quản: Các mẫu mới thu thập phải được vận chuyển đến phòng thí nghiệm càng nhanh càng tốt trong vòng 24 giờ. Mẫu phẩm nên được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ trong khi vận chuyển. Trường hợp khác phải được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu -40 đến -70 độ C tùy theo nhu cầu sử dụng các loại ống khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Lấy que ra khỏi túi tiệt trùng.
2. Sử dụng que lấy mẫu bệnh phẩm cho hầu họng hoặc tị hầu.
 - + Với que lấy dịch tị hầu : Nhẹ nhàng đưa đầu tăm bông vào lỗ mũi, giữ nguyên một lúc rồi xoay tròn nhẹ 3-4 lần.
 - + Với que lấy dịch hầu họng : Đưa que vào vùng hầu họng miết và xoay tròn nhẹ 3 – 4 lần hai bên thành họng và vùng amidan.
3. Mở ống đựng mẫu đặt que vào ống môi trường vận chuyển.
4. Nhẹ nhàng bẻ cán tay cầm khỏi đềm gãy, bỏ phần đuôi và vận chặt nắp ống.
5. Đánh dấu thông tin, lưu trữ, vận chuyển về phòng xét nghiệm.