

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU (2000ml)

Hướng dẫn sử dụng, cách dùng

- Đọc thông tin in trên bao bì và kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì.
- Xé túi PE theo vết cắt đã hướng đánh dấu để lấy sản phẩm
- Dùng tay mở túi ra theo phương thẳng đứng, kéo đầu ống cho thẳng và kiểm tra độ chắc chắn của các đầu van
- Khi sử dụng, gắn đầu van nối của túi nước tiểu vào ống thông tiểu hoặc thiết bị chuyên dụng

Chú ý:

- Luôn giữ phần túi đựng thẳng đứng trong suốt quá trình sử dụng .
- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn
- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần, không được tái sử dụng.
- Không được sử dụng khi bao bì có dấu hiệu hư hại.
- Không được sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng
- Sản phẩm sau khi sử dụng, sẽ được xử lý theo quy trình, quy định quản lý chất thải y tế của cơ quan chức năng.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đức Dũng