

140 mm

140 mm

10 mm

235 mm

10 mm



TCCS/STBA: TCCS 002:2021/RLP
Số lưu hành/Circulation Reg. No.....

TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU 2.000ml URINE BAG TIỆT TRÙNG : EO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, CÁCH DÙNG

- Đọc thông tin in trên bao bì và kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì.
- Xé túi PE theo vết cắt đã hướng đánh dấu để lấy sản phẩm
- Dùng tay mở túi ra theo phương thẳng đứng, kéo đầu ống cho thẳng và kiểm tra độ chắc chắn của các đầu van
- Khi sử dụng, gắn đầu van nối của túi nước tiểu vào ống thông tiểu hoặc thiết bị chuyên dụng

CHÚ Ý:

- Luôn giữ phần túi đựng thẳng đứng trong suốt quá trình sử dụng.
- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn
- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần, không được tái sử dụng.
- Không được sử dụng khi bao bì có dấu hiệu hư hại.
- Không được sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng
- Sản phẩm sau khi sử dụng, sẽ được xử lý theo quy trình, quy định quản lý chất thải y tế của cơ quan chức năng.

Chủng loại/mã sản phẩm: **UB-2000**



ĐƠN VỊ SẢN XUẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN
Lô H1- H9, Đường số 3 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

NSX : / /
HSD : / /
LÔ SX : / /

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI
CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE
Lô G4-G8, Đường số 8 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.



PHÊ DUYỆT



TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ ĐỨC DŨNG