



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ NAM THANH

Địa chỉ: Số 9 ngõ 147 Tân Mai, Tổ 37, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH XỊT MŨI VIRALEZE

MÔ TẢ SẢN PHẨM

VIRALEZE là sản phẩm xịt mũi kháng virus có chứa 1% w/w natri astodrimmer, đã được chứng minh trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm giúp bất hoạt virus đường hô hấp, bao gồm > 99,9% coronavirus SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19, giúp giảm phơi nhiễm với mầm bệnh do virus.

Thành phần: Nước tinh khiết, astodrimmer sodium, glycerol, propylene glycol, sodium hydroxide, methyl p-hydroxybenzoate, carbomer homopolymer type B, propyl p-hydroxybenzoate, disodium edetate.

MỤC ĐÍCH/ CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Xịt mũi VIRALEZE có chứa natri astodrimmer, có tác dụng kháng virus và đã được chứng minh trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm giúp bất hoạt virus, cung cấp thêm một hàng rào vật lý nữa đối với virus đường hô hấp và giúp giảm phơi nhiễm với các mầm bệnh virus đường hô hấp. Các virus bất hoạt sẽ được loại bỏ tự nhiên qua chất nhầy ở mũi. Giảm tải lượng virus có thể giúp ngăn ngừa tình trạng bị nhiễm virus và lây nhiễm cho người khác.

Ngoài việc cung cấp một hàng rào bảo vệ chống lại virus.

Xịt mũi VIRALEZE còn cung cấp một lớp dưỡng ẩm, giúp giữ nước cho mô mũi, bảo vệ mô mũi khỏi tình trạng khô và tổn thương.

Xịt mũi VIRALEZE nên được sử dụng cùng với các biện pháp thực hành vệ sinh tốt, chẳng hạn như sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên để đảm bảo được bảo vệ tốt nhất chống lại các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng cho trẻ em

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chỉ sử dụng cho người lớn. 1 lần xịt vào mỗi bên mũi theo yêu cầu, tối đa 4 lần mỗi ngày.

1. Xì mũi nhẹ nhàng để làm thông mũi.
2. Rửa tay bằng xà phòng và nước rồi lau khô bằng khăn sạch. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch rửa tay khô.



3. Tháo nắp bảo vệ khỏi vòi phun.
4. Giữ bình xịt bằng ngón trỏ và ngón giữa ở mỗi bên bình và ngón tay cái đặt ở đáy bình.
5. Nếu cần thiết, hãy thử bình xịt **VIRALEZE** bằng cách xịt một hoặc nhiều lần vào không khí hoặc vào khăn giấy cho đến khi tạo ra một lớp sương mịn. Lúc này bình xịt **VIRALEZE** đã sẵn sàng để sử dụng.
6. Ấn vào 1 bên mũi và nhẹ nhàng đưa vòi bình xịt vào bên mũi kia (đầu mũi nên hướng về phía sau và hơi chéch ra khỏi đường giữa mũi).
7. Giữ bình xịt thẳng đứng, ấn vòi bơm để xả bình xịt trong khi hít thở nhẹ nhàng bằng mũi.
8. Lặp lại bước 6 và 7 cho bên mũi còn lại.
9. Lau vòi bằng khăn giấy sạch và đặt lại nắp bảo vệ sau khi sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.

Lưu ý:

- Chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.
- Sản phẩm chỉ nên được sử dụng riêng biệt cho mỗi cá nhân. Dùng chung bình xịt có thể dẫn đến lây nhiễm chéo

CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG

- Không sử dụng nếu bạn có tiền sử nhạy cảm với hydroxybenzoat, astodrimer natri hoặc bất kỳ thành phần nào khác trong thành phần.
- Không dùng chung với các sản phẩm nhỏ mũi khác.
- Không sử dụng nếu bao bì hoặc hộp đựng bị hư hỏng.
- Thăm khám bác sĩ nếu các triệu chứng hô hấp xuất hiện, kéo dài hoặc trầm trọng hơn.
- Ngừng sử dụng nếu sản phẩm gây ra phản ứng phụ như kích ứng mũi, chảy máu mũi hoặc nghẹt mũi và tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Tránh tiếp xúc với mắt.

- Để tránh lây nhiễm, không sử dụng một bình xịt cho nhiều người.

BẢO QUẢN



Không bảo quản lạnh. Không làm đông. Bảo quản dưới 30°C.



Tránh xa tầm tay trẻ em. Xem số lô và hạn sử dụng trên thân và dưới vỏ bình. Bỏ vào thùng rác vỏ bình xịt đã qua sử dụng.

Đóng gói

Hộp giấy bao gồm: Một bình xịt đa liều bằng nhựa, có nắp, chứa 10 mL dung dịch xịt mũi **VIRALEZE**

