

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **XỊT MŨI THIÊN NAM**

Model/mã sản phẩm: **LOYAL A**

1. THÀNH PHẦN

Vỏ quả cau, Hoa sứ, Bình bát, Ngũ trảo, Cỏ roi ngựa, Ethanol, Nước vừa đủ.

2. CÔNG DỤNG

- Vệ sinh, làm sạch mũi, làm loãng dịch nhầy trong mũi, loại bỏ các dị nguyên, giúp khoang mũi, họng thông thoáng dễ thở.
- Hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm mũi, viêm xoang dị ứng cấp và mạn tính.
- Hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập vùng hầu họng.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng

- Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần. Ngày dùng 3-4 lần.

Đối tượng sử dụng:

- Người bị ngạt mũi, viêm mũi khó thở
- Người bị viêm mũi, viêm xoang, viêm hầu họng.
- Dự phòng sự xâm nhập của virus, vi khuẩn qua đường hầu họng

4. BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

5. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

