

**Tờ hướng dẫn sử dụng**

**Dung dịch bôi trơn và giữ ẩm cho mắt**

**Mô tả:**

DayDrop là dung dịch vô trùng dùng trong nhãn khoa giúp giữ ẩm và bôi trơn mắt nhờ ectoine, carboxymethylcellulose và sodium hyaluronate ở dạng hydrogel. DayDrop là dung dịch nhỏ mắt vô trùng, được đệm pH, không chứa phosphate và không có chất bảo quản.

**Thành phần:**

Công thức DayDrop bao gồm:

Thành phần	% (w/w)
Ectoine	2
Sodium hyaluronate	0.1
Carboxymethylcellulose	0.15
Disodium tetraborate decahydrated	0.1
Boric acid	0.8
Nước tinh khiết	v.đ 100

**Đóng gói:**

DayDrop được đóng gói trong các ống đơn liều 0,4 ml làm bằng polyetylen mật độ thấp. Mỗi hộp chứa 30 ống đơn liều.

**Mục đích sử dụng:**

DayDrop là dung dịch nhỏ mắt được chỉ định để giảm bớt triệu chứng khô và kích ứng mắt do các yếu tố môi trường (gió, bụi, điều hòa không khí, nhiệt khô), sử dụng màn hình trong thời gian dài hoặc mang kính áp tròng và/ hoặc một số bệnh lý có các triệu chứng nêu trên.

**Tính chất:**

DayDrop làm giảm chứng khô mắt và cảm giác mắt khô.

DayDrop làm giảm kích ứng ở mắt.

DayDrop hỗ trợ mắt chống lại các chất gây dị ứng bên ngoài và làm giảm các triệu chứng dị ứng.



DayDrop tương hợp với kính áp tròng.

### **Liều lượng và cách dùng:**

DayDrop được sử dụng để nhỏ mắt (nhỏ trên bề mặt mắt).

Trước khi mở ống DayDrop mới, phải đảm bảo ống dung dịch nhỏ mắt còn nguyên vẹn bằng cách kiểm tra tính toàn vẹn của vòng bảo vệ và đầu ống.

Dung dịch phải được sử dụng ngay sau khi mở. Để tránh nhiễm khuẩn đầu ống hoặc sản phẩm, không chạm đầu ống vào lên mắt hoặc các bề mặt khác.


Đối với những người khó cầm nắm, hoặc người cao tuổi nên được sự hỗ trợ để sử dụng đúng cách.

Liều khuyến cáo là nhỏ một hoặc hai giọt vào mỗi mắt, nhiều lần khi cần thiết hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

### **Hướng dẫn sử dụng:**

1. Rửa sạch và lau khô tay trước khi sử dụng.
2. Lấy một ống đơn liều ra khỏi dải.
3. Xác định rằng ống không bị nứt mẻ hoặc đứt.
4. Vặn ngược đầu ống để mở.
5. Tháo đầu ống.
6. Ngửa đầu ra sau và nhìn lên.
7. Kéo nhẹ mí dưới để tạo thành một túi nhỏ giữa mí và mắt.
8. Giữ ống nhỏ mắt bằng tay kia giữa ngón cái và ngón giữa và ấn nhẹ để nhỏ một hoặc hai giọt DayDrop vào túi mí mắt.
9. Nháy mắt nhiều lần để dung dịch nhỏ mắt phân bố trên khắp mắt.
10. Nếu dung dịch rơi ra ngoài, hãy làm lại các bước trên.
11. Cẩn thận lau sạch phần còn lại của dung dịch có thể dính quanh mí mắt bằng gạc.
12. Lặp lại quy trình với mắt còn lại.
13. Bỏ ống dùng một lần (khi đã mở không sử dụng lại ống cho những lần tiếp theo).

### **Chống chỉ định:**

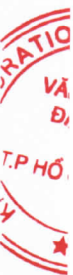

Không dùng DayDrop nếu quá mẫn với axit hyaluronic hoặc các thành phần khác của sản phẩm.

**Cảnh báo và thận trọng:**

- Không sử dụng nếu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không để đầu ống nhỏ mắt tiếp xúc với mắt hoặc bất kỳ bề mặt nào.
- Không dùng chung sản phẩm với người khác.
- Có thể bị mờ mắt ngay sau khi sử dụng sản phẩm. Chờ cho thị lực rõ ràng trước khi thực hiện các hoạt động rủi ro do mờ mắt.
- Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn ghi trên hộp hoặc trên bao bì.
- Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.
- Thận trọng khi sử dụng cho trẻ em (sản phẩm không được thẩm định ở trẻ em)
- Chỉ dùng ngoài, không được uống.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia nhãn khoa trước khi sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

**Tương tác:**

Không sử dụng với các sản phẩm khác có chứa muối amoni bậc bốn như benzalkonium chloride vì natri hyaluronate có thể kết tủa khi kết hợp.

Sau khi sử dụng DayDrop, hãy đợi ít nhất 15 phút để dùng các sản phẩm khác hoặc thuốc khác lên mắt.

DayDrop tương thích với các loại kính áp tròng. Sau khi đeo kính áp tròng và trước khi nhỏ sản phẩm, khuyến cáo nên đợi khoảng 30 phút để tránh các phản ứng tương kỵ giữa sản phẩm dùng để bảo dưỡng kính áp tròng và DayDrop.

**Tác dụng không mong muốn:**

DayDrop được dung nạp tốt.

Trong một số trường hợp, nó có thể gây kích ứng mắt tạm thời, mờ mắt, cảm giác khác lạ hoặc sưng huyết mắt. Hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào liên quan đến việc sử dụng DayDrop. Nếu những tác dụng này kéo dài hoặc trầm trọng hơn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

**Bảo quản:**



Bảo quản từ 5°C đến 25°C. Không đông lạnh, bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 2 năm

Không sử dụng sau ngày ghi trên bao bì.

**Nhà sản xuất:**

I+Med S. Coop.

C/Albert Einstein, 15. Pab 15, 01510- Vitoria-Gasteiz, Alava, Tây Ban Nha

