

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ):

Sản xuất và sở hữu bởi : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI**
Địa chỉ: Số nhà 17, đường Phúc Hậu, thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phân phối độc quyền bởi : **CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE**
Địa chỉ : 967 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế:	XỊT HỌNG (Chủng loại/Mã sản phẩm: HAVIBEE/01)
1.1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế:	<p>- Tên sản phẩm: XỊT HỌNG (Chủng loại/Mã sản phẩm: HAVIBEE/01)</p> <p>- Mô tả: XỊT HỌNG (Chủng loại/Mã sản phẩm: HAVIBEE/01) được đóng trong túi/ chai/ bình/ tuýp đựng được làm bằng thủy tinh / PE/ PET/HDPE... gồm 3 bộ phận nắp bình, thân bình và đầu xịt.</p> <p>Thành phần:</p> <p>- Dịch chiết Xuyên Tâm Liên, Keo ong, Chiết xuất cỏ xạ hương, Sorbitol, Menthol, Tinh dầu Bạc Hà, Tinh dầu khuynh diệp, Sodium saccharin, Glycerin, Propylene glycol, phụ liệu khác vừa đủ.</p> <p>Nguyên lý hoạt động : Mở nắp bình, đưa thiết bị xịt đến vùng cần sử dụng rồi nhấn nút xịt, thiết bị sẽ phun dung dịch và vị trí cần sử dụng giúp làm sạch miệng, hỗ trợ điều trị cúm do vi khuẩn.</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Nhãn và Hộp đúng quy cách ;
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Giúp làm sạch miệng, họng, làm dịu mát họng khi ngứa rát cổ họng, đau họng, khàn tiếng, ho do viêm họng, ho kéo dài.- Hỗ trợ ngừa khuẩn, kháng viêm, giúp tiêu đờm, giảm ho.- Hỗ trợ điều trị cúm do vi khuẩn, virus xâm nhập, cúm mùa...
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: xịt vào họng ngày 4-6 lần, cách nhau 3-4 giờ hoặc xịt khi ho, cảm thấy ngứa họng, mỗi lần xịt 2-4 nhíp.- Trẻ em từ 2-6 tuổi: xịt 3-4 lần/ ngày, mỗi lần ấn 1-2 lần.



		<ul style="list-style-type: none"> - Trẻ từ 1-2 tuổi: xịt 2-3 lần/ngày, mỗi lần ấn 1-2 lần. - Trẻ dưới 1 tuổi tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng. <p>ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm dùng an toàn cho trẻ nhỏ, phụ nữ đang cho con bú. - Phụ nữ có thai cần hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng.
1.5	Chống chỉ định	- Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Nơi khô ráo, thoáng, nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: - Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng, nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phương Khanh

