

B117-100 / 1244-114



DELFINA®

Wash

Concentrate

Hướng dẫn sử dụng.

Sản xuất bởi:

Wallac Oy,

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Phần Lan

www.perkinelmer.com

DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN *IN VITRO*

CE


PerkinElmer®

BIỂU TƯỢNG



Thiết bị chuẩn đoán *In vitro* / *In vitro* diagnostic medical device / Dispositif médical de diagnostic *in vitro* / *In-vitro*-Diagnostikum / Producto sanitario para diagnóstico *in vitro* / Dispositivo medico-diagnostico *in vitro* / Dispositivo médico para diagnóstico *in vitro* / Medicinteknisk produkt avsedd för *in vitro*-diagnostik / Medicinsk udstyr til *in vitro*-diagnostik / Wyrób medyczny do diagnozy *in vitro* / Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro* / Para uso diagnóstico *in vitro* / Медицинское изделие для диагностики *in vitro*



Số lô / Batch code / Code du lot / Chargenbezeichnung / Código de lote / Codice di lotto / Código do lote / Satsnummer / Batchkode / Kod partii / Kód šarže / Número do lote / Код партии



Mã đóng gói / Packing number / Numéro d'emballage / Packnummer / Número de envase / Numero confezioni / Número de embalagem / Förpackningsnummer / Emballagenummer / Liczba opakowań / Číslo balení / Número de embalagem / № упаковки



Số Catalog / Catalog number / Référence du catalogue / Bestellnummer / Número de catálogo / Riferimento di catalogo / Número de catálogo / Listnummer / Bestillingsnummer / Numer katalogowy / Katalogové číslo / Código / Номер по каталогу



Hạn sử dụng / Use by / Utiliser jusqu'au / Verwendbar bis / Fecha de caducidad / Utilizzare entro / Prazo de validade / Används före / Udløbsdato / Użyć przed / Spotřebujte do / Data limite de utilização / Использовать до



Nhiệt độ bảo quản / Temperature limitation / Limites de température / Temperaturbegrenzung / Limitación de temperatura / Limiti di temperatura / Limites de temperatura / Temperaturbegränsning / Temperaturbegrænsning / Zakres temperatur / Teplotní omezení / Limite de temperatura / Температурный диапазон



Tham khảo hướng dẫn sử dụng / Consult instructions for use / Consulter la notice d'utilisation / Gebrauchsanweisung beachten / Consúltense las instrucciones de uso / Consultare le istruzioni per l'uso / Consultar as instruções de utilização / Läs bruksanvisningen / Se bruksanvisningen / Sprawdź w instrukcji obsługi / Viz návod k použití / Consultar Instruções de uso / Обратитесь к инструкции по применению



Nhà sản xuất / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabbicante / Fabricante / Tillverkare / Fabrikant / Wytwórca / Výrobce / Fabricante / Изготовитель



Theo hướng mũi tên lên trên / This way up / Haut / Diese Seite oben / Este lado arriba / Questo lato in alto / Este lado para cima / Denna sida upp / Denne side op / Tę stroną do góry / Touto stranou nahoru



Có thể tái chế / Recyclable / Recyclable / Recyclebar / Reciclable / Riciclabile / Reciclável / Återvinningsbart / Genanvendeligt / Można poddawać recyklingowi / Recyklovateľný / Reciclável / Пригодно для повторного использования

DELFIA Wash Concentrate B117-100 / 1244-114

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dung dịch rửa cô đặc DELFIA Wash Concentrate sau khi pha loãng bằng nước khử ion được sử dụng trong chẩn đoán *in vitro* bằng thiết bị rửa đĩa DELFIA Platewash hoặc hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động AutoDELFIA.

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

Dung dịch rửa cô đặc DELFIA Wash Concentrate có hai kích cỡ đóng gói:

- 1 chai 250 ml (mã sản phẩm 1244-114)
- 8 x 1 chai 250 ml (mã sản phẩm B117-100)

Dung dịch Rửa cô đặc là dung dịch cô đặc 25 lần của dung dịch muối đệm Tris-HCl (pH 7,8) với Tween 20 và có chứa chất bảo quản Germall II¹

Bảo quản ở nhiệt độ +2—+8 °C cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn chai.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thiết bị rửa đĩa DELFIA Platewash hoặc bộ xử lý đĩa AutoDELFIA Plate Processor

Đổ 250 ml Dung dịch Rửa cô đặc Wash Concentrate vào một bình sạch và pha loãng với 6000 ml nước khử ion theo tỷ lệ 1:25 để thu được dung dịch đệm rửa (pH 7,8).

Dung dịch rửa đã hoàn nguyên giữ được tính ổn định trong 2 tuần khi bảo quản trong bình kín ở nhiệt độ +2—+25 °C.

Thiết bị xử lý mẫu AutoDELFIA Sample Processor

Pha loãng Dung dịch Rửa cô đặc Wash Concentrate bằng cách thêm 50 ml dung dịch rửa cô đặc vào 4950 ml nước khử ion theo tỷ lệ 1:100.

Dung dịch rửa đã hoàn nguyên giữ được tính ổn định trong 1 tuần khi bảo quản trong lọ kín ở nhiệt độ +2—+25 °C.

Các thay đổi được đánh dấu và / hoặc thể hiện với đường thẳng đứng.

Chỉnh sửa lần cuối vào tháng 5 năm 2016

DELFIA and AutoDELFIA là những thương hiệu đã được đăng ký của PerkinElmer, Inc.

¹ Germall là một thương hiệu đã được đăng ký của ISP Investments, Inc.

Sản xuất bởi:

Wallac Oy
Mustionkatu 6
FI-20750 Turku
PHẦN LAN

Tel. + 358-2-2678 111

<http://www.perkinelmer.com>