

## NHÂN PHỤ

**Tên sản phẩm: MẶT NẠ OXY CÓ TÚI**

**Mã sản phẩm: GT010-160**

**NK & PP:** Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Kim

**Địa chỉ:** 383 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

**Tel:** 028 3863 9201 – 028 3866 5909

**Di động:** 090 7146 679

**Email:** [tbhoangkim@gmail.com](mailto:tbhoangkim@gmail.com)

**Nhà SX:** NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

**Địa chỉ NSX:** 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042  
Ningbo, Zhejiang Province, China.

**Nước SX:** Trung Quốc

**Số lượng, Ngày SX, HSD:** Xem trên bao bì

**Qui cách đóng gói:** 50 cái/ thùng

### **HDSĐ:**

- Lắp cột đo lưu lượng vào nguồn cấp oxy;
- Lắp bình làm ẩm vào cột lưu lượng;
- Lắp dây dẫn oxy vào đầu ra cột lưu lượng hoặc bình làm ẩm;
- Lắp mặt nạ vào dây dẫn;
- Điều chỉnh lưu lượng oxy thở qua mặt nạ phù hợp với từng trường hợp khác nhau theo đúng chỉ định;
- Kiểm tra oxy các mối nối, đảm bảo không bị hở;
- Đưa mặt nạ kín mũi và miệng bệnh nhân

**Số lưu hành:**

**CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Phương Châu*