

NHÂN PHỤ

Tên sản phẩm: ỚNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN (CÓ BÓNG, KHÔNG BÓNG)

Mã sản phẩm: GT014-100; GT014-200

NK & PP: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Kim

Địa chỉ: 383 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Tel: 028 3863 9201 – 028 3866 5909

Di động: 090 7146 679

Email: tbhoangkim@gmail.com

Nhà SX: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Địa chỉ NSX: 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China.

Nước SX: Trung Quốc

Số lượng, Ngày SX, HSD: Xem trên bao bì

Qui cách đóng gói: 100 cái/ thùng

HDSĐ:

*** Có bóng:**

- Trước khi đặt nội khí quản, xả hơi bóng
- Sau khi đặt nội khí quản, bơm hơi bóng để làm kín hiệu quả
- Ngay sau khi bơm hơi bóng, tiến hành nghe tim mạch cả hai trường phổi. Nếu âm thanh hơi thở khoeo giảm dần, hãy điều chỉnh ống theo yêu cầu.
- Nên xác định vị trí đặt ống nội khí quản bằng cách xem vị trí của đầu ống với phim chụp X quang phổi

*** Không bóng**

- Chọn kích thước ống nội khí quản thích hợp
- Sau khi đặt, nghe tim mạch cả hai trường phổi. Nếu âm thanh hơi thở khoeo giảm dần, hãy điều chỉnh ống theo yêu cầu.
- Nên xác định vị trí đặt ống nội khí quản bằng cách xem vị trí của đầu ống với phim chụp X quang phổi

Số lưu hành:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phương Châu