

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO  
HÃNG GREETMED – CHINA**

STT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước sản xuất
1	Mặt nạ oxy	GT010-110	Kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp cột đo lưu lượng vào nguồn cấp oxy;</li> <li>- Lắp bình làm ấm vào cột lưu lượng;</li> <li>- Lắp dây dẫn oxy vào đầu ra cột lưu lượng hoặc bình làm ấm;</li> <li>- Lắp mặt nạ vào dây dẫn;</li> <li>- Điều chỉnh lưu lượng oxy thở qua mặt nạ phù hợp với từng trường hợp khác nhau theo đúng chỉ định;</li> <li>- Kiểm tra oxy các mối nối, đảm bảo không bị hở;</li> <li>- Đưa mặt nạ kín mũi và miệng bệnh nhân</li> </ul>	<p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p>	<p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p>

**‘Người đại diện hợp pháp của cơ sở**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Phương Châu*