

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO
HÃNG GREETMED – CHINA

STT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, Nước sản xuất
1	Mặt nạ oxy có túi	GT010-160	<p>Kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp cột đo lưu lượng vào nguồn cấp oxy; - Lắp bình làm ấm vào cột lưu lượng; - Lắp dây dẫn oxy vào đầu ra cột lưu lượng hoặc bình làm ấm; - Lắp mặt nạ vào dây dẫn; - Điều chỉnh lưu lượng oxy thở qua mặt nạ phù hợp với từng trường hợp khác nhau theo đúng chỉ định; - Kiểm tra oxy các mối nối, đảm bảo không bị hở; - Đưa mặt nạ kín mũi và miệng bệnh nhân 	<p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p>	<p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p>

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÓ GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)
Nguyễn Thị Phương Châu