

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO
HÃNG GREETMED – CHINA**

STT	Tên trang thiết bị	Mã sản phẩm	Mục đích sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước sản xuất
1	Ống nội khí quản (có bóng; không bóng)	GT014-100 GT014-200	Nhằm giữ sự thông thoáng bên trong đường hô hấp	<p>* Có bóng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trước khi đặt nội khí quản, xả hơi bóng - Sau khi đặt nội khí quản, bơm hơi bóng để làm kín hiệu quả - Ngay sau khi bơm hơi bóng, tiến hành nghe tim mạch cả hai trường phổi. Nếu âm thanh hơi thở khoẻ giảm dần, hãy điều chỉnh ống theo yêu cầu. - Nên xác định vị trí đặt ống nội khí quản bằng cách xem vị trí của đầu ống với phim chụp X quang phổi <p>* Không bóng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chọn kích thước ống nội khí quản thích hợp - Sau khi đặt, nghe tim mạch cả hai 	<p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD ; 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p>	<p>NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD ; 16F, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, China</p>



				<p>trường phổi. Nếu âm thanh hơi thở khoeo giảm dần, hãy điều chỉnh ống theo yêu cầu.</p> <p>- Nên xác định vị trí đặt ống nội khí quản bằng cách xem vị trí của đầu ống với phim chụp X quang phổi</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

PHÓ GIÁM ĐỐC

Handwritten signature

Nguyễn Thị Phụng Quyên

