

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
XỊT TAI ETIKON**

**THÀNH PHẦN:**

NaCl, HClO, O3, HO2, ClO2, PEG-40, Nước RO vừa đủ.

**CÔNG DỤNG:**

- Vệ sinh làm mềm, làm sạch ráy tai hàng ngày hoặc sau khi bơi.
- Hỗ trợ điều trị viêm tai trong và tai ngoài, phòng ngừa viêm tai, kháng khuẩn, giảm phù nề, giảm tiết mủ.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- Lắc nhẹ sản phẩm, hướng đầu vòi xịt vào cửa tai, xịt trực tiếp vào 2 bên tai khoảng 2-4 nhát xịt.
- Dùng 3-4 lần/ngày hoặc nhiều hơn khi cần thiết.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 °C. Đậy nắp kín ngay sau khi sử dụng.

*Tp. Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022*



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Thanh Tâm*