

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

XỊT BÓ BỘT

THÀNH PHẦN

Calci natri borosilicate, isopropanol, dầu trầm trà, menthol, caprylyl glycol, pentylene glycol và decylene glycol

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Sản phẩm được sử dụng với mục đích hút ẩm, khử mùi hôi và làm giảm sự khó chịu trên da khi bó bột.

CÁCH DÙNG

Lắc kỹ trước khi sử dụng. Lắp ống vào đầu xịt. Đưa ống vào khu vực bị ảnh hưởng và xịt.

Có thể sử dụng thường xuyên khi cần thiết hoặc sau mỗi 4-5 giờ. Không xịt vào vết thương hở và sử dụng trên mặt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng trên trẻ em dưới 18 tuổi và đối tượng nhạy cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm.

Không sử dụng cho vết thương hở và trên mặt.

CẢNH BÁO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Tránh xa tầm tay của trẻ em;
- Tránh ánh sáng mặt trời và không tiếp xúc với nhiệt độ trên 50°C;
- Không đâm thủng hoặc đốt lọ chứa, ngay cả khi sử dụng hết;
- Tránh xa các nguồn dễ cháy nổ;
- Không xịt sản phẩm vào ngọn lửa hoặc bất kì vật liệu nóng nào;
- Không sử dụng sản phẩm trong không gian hẹp;
- Chỉ sử dụng sản phẩm này ngoài da và theo hướng dẫn sử dụng; Tránh hít thở khi xịt sản phẩm và tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa sạch mắt;
- Nếu có phát ban ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ. Nếu nuốt phải sản phẩm cần liên hệ cấp cứu ngay lập tức để được xử trí kịp thời.

TÁC DỤNG BẤT LỢI

Một số người dùng có xảy ra kích ứng da do dị ứng với các thành phần của sản phẩm.

BẢO QUẢN



Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp và không tiếp xúc với nguồn nhiệt trên 50°C

Sản phẩm chứa chất rất dễ cháy, tránh xa các nguồn dễ cháy, không xịt sản phẩm vào ngọn lửa hoặc vật liệu dễ cháy.

HẠN DÙNG

3 năm kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN: TCCS

CƠ SỞ SẢN XUẤT

CHATURONG COOLING LIMITED PARTNERSHIP

No. 39/4-5 SPK Factory Land, Moo 4, 345-Bangbuathong Road, Lahan, Bangbuathong, Nonthaburi, 11110 Thailand.

CƠ SỞ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH NOVOPHARM

Số 5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Long