

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nước muối sinh lý 0,9

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại DP Vật tư y tế VUSOHU Việt Nam

Địa chỉ trụ sở: Thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ sản xuất: Thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0962126333

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NƯỚC MUỐI SINH LÝ

1. Tên sản phẩm: NƯỚC MUỐI SINH LÝ NACL 0.9%

2. Dạng bào chế: Dung dịch

3. Thành phần:

Natri chlorid , Nước tinh khiết

4. Chỉ định:

- Dùng để súc miệng – họng
- Dùng rửa mặt, mũi, tai và các vết thương nhẹ ngoài da

5. Cách dùng:

- Dùng để súc miệng – họng: Ngậm 20-30ml dung dịch, súc kỹ khoảng 30 giây, ngày 2-3 lần.
- Dùng rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn trên da.
- Dùng rửa mũi: Bơm dung dịch qua mũi, ngày 2-3 lần.
- Dùng rửa tai và các vết thương nhẹ ngoài da: dùng bông hoặc gạc sạch tẩm dung dịch, rửa ngày 3-4 lần

6. Chống chỉ định:

Tránh để dung dịch tiếp xúc với người quá mẫn với các thành phần của sản phẩm

7. Cảnh báo và thận trọng:

- Không được tiêm
- Để xa tầm tay trẻ em

8. Hạn dùng: 36 tháng

