

GIÒNH LIX  
Nacato

# Nacato

XỊT HỌNG



Giảm nhanh ngứa họng, ho

viêm họng, amidan, khàn tiếng

Tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc họng



25 ml



#### THÀNH PHẦN:

Dung dịch khoáng hóa HClO, O<sub>2</sub>, HO<sub>2</sub>, ClO<sub>2</sub>, NaCl, Menthol, Natri benzoate, Glycerin, Purified water

#### CÔNG DỤNG:

- Làm dịu nhanh các phản ứng đau họng, giảm ngứa họng, rát họng.
- Giúp giảm các triệu chứng ho và cảm lạnh.
- Giúp làm giảm sự phát triển của vi khuẩn, cải thiện các triệu chứng của viêm loét miệng - họng, hôi miệng.
- Phòng viêm nhiễm đường hô hấp trên do virus, vi khuẩn.
- Hỗ trợ các tình trạng viêm họng cấp, viêm họng hạt, viêm họng mãn tính, phòng ngừa viêm phế quản ở người lớn và trẻ em.

#### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị ho, khô họng, đau rát họng, viêm họng cấp, viêm họng hạt mãn tính, nhiệt miệng, loét miệng lưỡi, hôi miệng.

Nhà SX và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

**CÔNG TY TNHH CZ PHARMA**

Địa chỉ: Số 34, Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Website: <https://czpharma.vn>

Số lưu hành:

TCCS 15:2021/CZ

LÔ SX :

NSX :

HSD :

# Nacato

XỊT HỌNG



Giảm nhanh ngứa họng, ho,

viêm họng, amidan, khàn tiếng

Tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc họng



25 ml



#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Lắc trước khi sử dụng
- Đưa đầu vòi phun sương vào khoang miệng. Với khô họng, viêm họng, đau họng, ngứa họng: hướng đầu vòi phun sương vào sâu cổ họng; với các nốt nhiệt miệng, loét miệng thì hướng thẳng đầu vòi phun sương vào các nốt nhiệt miệng, vết loét. Ấn nhẹ, dứt khoát để dung dịch đi tới vị trí mong muốn.
- Trẻ em trên 2 tuổi: 1 - 3 lần/ ngày, 1 - 2 nhát xịt/ lần
- Người lớn: 2 - 4 lần/ ngày, 2- 4 nhát xịt/ lần
- Trẻ em dưới 2 tuổi: Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

#### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Dùng cho người lớn và trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên.
- Trẻ em dùng phải có sự hướng dẫn của người lớn.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp

ĐỂ XA TẮM TRÉ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

