

25ml

Xịt tai

**Etikon**  
VLL

**Etikon**<sup>TM</sup>

Xịt tai



Sạch khuẩn vệ sinh tai

Giảm nhanh ngứa tai

Hỗ trợ điều trị viêm tai

**THÀNH PHẦN**

Dung dịch xịt tai Earexon bao gồm các thành phần: NaCl, HClO, O3, H2O2, ClO2, PEG-40, Nước RO vừa đủ.

**CÔNG DỤNG**

Vệ sinh làm mềm, làm sạch ráy tai hàng ngày hoặc sau khi bơi.

Hỗ trợ điều trị viêm tai trong và tai ngoài, phòng ngừa viêm tai, kháng khuẩn, giảm phù nề, giảm tiết mủ.

**CÁCH DÙNG**

Lắc nhẹ sản phẩm, hướng đầu vòi xịt vào cửa tai, xịt trực tiếp vào 2 bên tai khoảng 2-4 nhát xịt.

Dùng 3-4 lần/ngày hoặc nhiều hơn khi cần thiết.

25ml

LÔ SX:

NSX :

HSD :

**Etikon**<sup>TM</sup>

Xịt tai



Sạch khuẩn vệ sinh tai

Giảm nhanh ngứa tai

Hỗ trợ điều trị viêm tai

25ml

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**

- Dùng cho người lớn và trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên.
- Trẻ em dùng phải có sự hướng dẫn của người lớn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**BẢO QUẢN**

- Để sản phẩm nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp.

TCCS 16:2021/CZ  
Số lưu hành:

Nhà SX và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

**CÔNG TY TNHH CZ PHARMA**

Địa chỉ: Số 34, Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Website: <https://czpharma.vn>



8 935326 1000

**Etikon**<sup>TM</sup>

Xịt tai