

XIT TAI CZ

XIT TAI CZ

- Sạch khuẩn vệ sinh tai
- Giảm nhanh ngứa tai
- Hỗ trợ điều trị viêm tai



25ml

THÀNH PHẦN

Dung dịch xịt tai Earexon bao gồm các thành phần: NaCl, HClO, O₃, H₂O₂, ClO₂, PEG-40, Nước RO vừa đủ.

CÔNG DỤNG

Vệ sinh làm mềm, làm sạch ráy tai hàng ngày hoặc sau khi bơi.

Hỗ trợ điều trị viêm tai trong và tai ngoài, phòng ngừa viêm tai, kháng khuẩn, giảm phù nề, giảm tiết mủ.

CÁCH DÙNG

Lắc nhẹ sản phẩm, hướng đầu vòi xịt vào cửa tai, xịt trực tiếp vào 2 bên tai khoảng 2-4 nhát xịt.

Dùng 3-4 lần/ngày hoặc nhiều hơn khi cần thiết.

TCCS 15:2021/CZ

Số lưu hành:

LÔ SX :

NSX :

HSD :

XIT TAI CZ

- Sạch khuẩn vệ sinh tai
- Giảm nhanh ngứa tai
- Hỗ trợ điều trị viêm tai



25ml

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Dùng cho người lớn và trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên.

- Trẻ em dùng phải có sự hướng dẫn của người lớn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN

- Để sản phẩm nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Sau khi sử dụng đậy kín nắp.

Nhà SX và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
Địa chỉ: Số 34, Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Website: <https://czpharma.vn>



8 935326 1000

XIT TAI CZ