

CZ INW LIX

THÀNH PHẦN:

Dung dịch khoáng hóa HClO, O₃, HO₂, ClO₂, NaCl, Kall Sorbate, Tween 20, nước RO vừa đủ.

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ làm sạch, rửa trôi dịch nhầy, bụi bẩn trong mũi. Giúp ngừa khuẩn kháng viêm.

Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm đa xoang, viêm xoang mãn tính, viêm xoang lâu năm, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mãn tính, ngứa mũi, sổ mũi, hắt hơi, chảy dịch mũi, mù.

Hỗ trợ điều trị đau đầu, nhức hốc mắt, nhức chân mày, nhức gò má do viêm xoang.

Số lưu hành:
TCCS 11:2021/CZ

LÔ SX:

NSX :

HSD :

XỊT MŨI CZ



Làm sạch giữ ẩm

Ngừa khuẩn, giảm viêm

Giảm nhanh viêm mũi,
viêm xoang, ngạt mũi
sổ mũi

25ml

CÁCH DÙNG:

Lắc nhẹ sản phẩm, xịt trực tiếp vào 2 bên mũi, hít một hơi nhẹ cho dung dịch đi sâu vào khoang mũi.

Xịt 3-4 lần/ngày hoặc nhiều hơn khi cần thiết.

CẢNH BÁO & THẬN TRỌNG:

Dùng cho người lớn và trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên

Trẻ em dùng phải có sự hướng dẫn của người lớn

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

BẢO QUẢN:

Để sản phẩm nơi khô thoáng tránh ánh nắng trực tiếp

Sau khi sử dụng đậy kín nắp

Nhà SX và chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
Địa chỉ: Số 34, Cụm Công Nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Website: <https://czpharma.vn>

XỊT MŨI CZ



Làm sạch giữ ẩm

Ngừa khuẩn, giảm viêm

Giảm nhanh viêm mũi,
viêm xoang, ngạt mũi
sổ mũi

25ml

