

SPRAY - GR



SPRAY - GR



XỊT MŨI NƯỚC MUỐI BIỂN

NANO SILVER

Tinh dầu khuynh diệp | Lô hội

Dùng cho:

**Người bị**

- sổ mũi
- ngạt mũi
- chảy nước mũi

Hỗ trợ:

- ☑ **Giúp vệ sinh, làm sạch mũi**
- ☑ Duy trì độ ẩm cho niêm mạc mũi
- ☑ Giúp mũi thông thoáng, dễ thở
- ☑ Làm loãng dịch nhầy



**THÀNH PHẦN:**

Dung dịch trong bình chứa gồm các thành phần: Nước muối biển, nano silver, lô hội, Cu gluconate, mangan gluconate, tinh dầu khuynh diệp.

**CÔNG DỤNG:**

Giúp vệ sinh, làm sạch mũi, làm loãng dịch nhầy, lấy đi chất bẩn trong khoang mũi, duy trì độ ẩm cho niêm mạc mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở.

**ỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

Người bị sổ mũi, ngạt mũi, chảy nước mũi

**CÁCH DÙNG:**

Bước 1: Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 nhát để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.

Bước 2: Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi.

Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 2-3 lần.

Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt.

Chống chỉ định: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

SPRAY - GR



SEA SALT NASAL SPRAY

NANO SILVER

Eucalyptus essential oil | Aloe

Use for:

**Person suffering from**

- snivel
- stuffy nose
- runny nose

Support:

- ☑ **Help cleaning, cleaning the nose**
- ☑ Maintain moisture for the nasal mucosa
- ☑ Help the nose ventilated, easy to breathe
- ☑ Dilute the mucus



**BẢO QUẢN:**

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

**TIÊU CHUẨN:**

TCCS 01:2022/BBT-GR

**SỐ CB:**

*Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER**

Địa chỉ: Số 14 ngõ 226 phố Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

**Sản xuất tại:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA**

Địa chỉ: Thôn nghĩa hảo, phú nghĩa, chương mỹ, hà nội.

LSX:

NSX:

HSD:

