

## BỘ BÌNH RỬA MŨI NASACLEANS

### Thành phần:

- Bộ bình rửa mũi NASACLEANS bao gồm: 1 bình rửa mũi và 10 gói muối biển tinh khiết rửa mũi xoang.

### Công dụng:

- Giúp rửa sạch chảy nhầy trong mũi, vệ sinh mũi sạch sẽ.
- Giúp kháng khuẩn, kháng viêm, thông mũi, dễ thở và tạo cảm giác mát dịu nhờ cơ chế rửa sạch từ sâu bên trong mũi.
- Hỗ trợ điều trị các trường hợp bị nghẹt mũi, bị cảm, viêm xoang và viêm mũi dị ứng.
- Giảm những triệu chứng kích thích ở mũi do các nhân tố gây hại như vi khuẩn, không khí ô nhiễm, phấn hoa hay bụi bẩn.

### Đối tượng sử dụng:

- Người lớn và trẻ nhỏ.

### Cách dùng:

- Sử dụng máy tiệt trùng hoặc lò vi sóng, nước sôi để vệ sinh trước khi sử dụng.
- Dùng gói muối rửa mũi xoang 2,7g cho vào bình dùng nước ấm (nước tinh khiết, nước RO) gần với nhiệt độ cơ thể cho tan hỗn hợp muối.
- Cúi người về phía trước một cách thoải mái, tay cầm bình chếch 1 góc 30-40°, đặt phần đỉnh đầu vòi hình sen vào 1 bên mũi, tay bóp nhẹ nhàng thân bình từng nhịp để nước chảy sang mũi bên kia mang theo các chất nhầy bụi bám trong khoang mũi ra ngoài cho tới khi hết ½ đến ¼ lượng nước trong bình.
- Lặp lại các thao tác với bên mũi còn lại.
- Để không còn dung dịch trong mũi nghiêng đầu về phía trước và về bên mũi vừa rửa và hỉ nhẹ.





- Rửa sạch bộ dụng cụ và để nơi khô ráo.

**Chống chỉ định:**

- Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp viêm tai, vừa phẫu thuật tai, mũi đang bị tắc hoàn toàn hoặc tắc nghẽn lại, rối loạn nuốt.

**Cảnh báo và thận trọng:**

- Không ngừa mặt khi dùng.

- Không nên sử dụng chung bình vệ sinh mũi với người khác.

- Kiểm tra định kỳ bình, nắp và ống để đảm bảo mọi thứ đều sạch, không bị biến màu hoặc rạn nứt. Nếu có bất kỳ dấu hiệu hay vấn đề, hãy thay bộ sản phẩm mới.

- Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong trường hợp đã từng phẫu thuật tai hoặc viêm xoang gần đây.

- Trẻ em sử dụng dưới sự hướng dẫn của người lớn.

- Nên dùng sản phẩm 1 tiếng trước khi đi ngủ nhằm tránh phần dung dịch thừa chảy xuống cổ họng.

**Bảo quản:**

- Bảo quản trong điều kiện thông thường, khô ráo, nhiệt độ dưới 30 độ C. Hộp được đựng kín và bảo quản trong môi trường hút chân không, không hở hay những nguyên nhân bất thường khác có thể dẫn tới giảm cấp chất lượng sản phẩm. Sản phẩm bị giảm cấp thường sẽ bị bay hơi, bị biến mùi hương so với sản phẩm còn tốt.

- Muối biển tinh khiết rửa mũi xoang phải được bảo quản cẩn thận, sạch sẽ từ khi sản xuất tới lúc nhập kho, cũng như trong khâu vận chuyển. Không vận chuyển, bảo quản muối biển tinh khiết rửa mũi xoang cùng với dầu mỡ, hóa chất và các sản phẩm khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

**Hạn dùng:**





- Khuyến dùng sản phẩm trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày sản phẩm xuất xưởng để có được chất lượng tốt nhất.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối:**

Công ty Cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Vinh Phát

Địa chỉ: Số 72, ngõ 318 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Nhà sản xuất:**

Công ty Cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Vinh Phát

Địa chỉ sản xuất: Số 25, ngõ 557, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 21, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở**

(Ký và đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Trịnh Thế Quang*

C P I / \*