



**Nasal Cleans**

ISO 134585-2016

**Nasal Cleans**

Giá trị vượt trội

**Nasal Cleans**

Giá trị vượt trội

Value - Phenomenal

**THÀNH PHẦN**

- Không sử dụng trong các trường hợp: viêm tai, vữa phẫu thuật tai, mũi đang bị tắc hoàn toàn hoặc tắc nghẽn tai, rối loạn nuốt.
- Không ngứa mắt khi dùng.
- Không nên sử dụng chung bình vệ sinh mũi với người khác.
- Kiểm tra định kỳ bình, nắp và ống để đảm bảo mọi thứ đều sạch, không bị biến màu hoặc rạn nứt. Nếu có bất kỳ dấu hiệu hay vấn đề, hãy thay bộ sản phẩm mới.
- Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong trường hợp đã từng phẫu thuật tai hoặc viêm xoang gần đây.
- Nếu cảm thấy bị áp lực trong tai hay mũi khi sử dụng, hãy ngừng và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Trẻ em sử dụng dưới sự hướng dẫn của người lớn.
- Nên dùng sản phẩm 1 tiếng trước khi đi ngủ, nhằm tránh phần dung dịch thừa chảy xuống cổ họng.

**CÔNG DỤNG**

- Giúp rửa sạch chất nhầy trong mũi, vệ sinh mũi sạch sẽ.
- Giúp kháng khuẩn, kháng viêm, thông mũi, dễ thở và tạo cảm giác mát dịu nhờ cơ chế rửa sạch từ sâu bên trong mũi.
- Hỗ trợ điều trị các trường hợp bị nghẹt mũi, bị cảm, viêm xoang và viêm mũi dị ứng.
- Giảm những triệu chứng kích thích ở mũi do các nhân tố gây hại như vi khuẩn, không khí ô nhiễm, phấn hoa, bụi bẩn.

**BẢO QUẢN**

Bảo quản nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.  
Sản xuất theo Tiêu chuẩn:  
TCCS Số 04-TBYT-2021-VP

Hỗ trợ khách hàng và thông tin về cơ sở bảo hành  
**0986.266.116**  
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00  
từ ngày 11, thứ bảy, chủ nhật



**Nasal Cleans**

ISO 134585-2016

Bộ sản phẩm Nasal Cleans gồm 1 bình vệ sinh mũi và 10 gói muối được phẩm.

**BÌNH VỆ SINH MŨI Nasalcleans**

- Nguyên liệu an toàn cho sức khỏe, không gây kích ứng, dùng được cho cả người lớn và trẻ em.
- Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, chỉ cần bóp nhẹ dung dịch sẽ chảy thông đều qua hốc mũi và rửa sạch khoang mũi cũng như đẩy các chất dịch nhầy, vi khuẩn, bụi bẩn từ sâu bên trong ra ngoài, giúp sát khuẩn đường hô hấp.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

**Nasal Cleans**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU VINH PHÁT  
Số 72 Ngõ 318 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội  
www.bebemarks.vn

8 9 3 6 0 9 1 1 8 4 0 0 4 6

**Nasal Cleans**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM VỆ SINH KHOANG MŨI, SÂU VÀ KHÁNG KHUẨN

**LỢI ÍCH CỦA VIỆC RỬA MŨI BẰNG BÌNH NASACLEANS**

- Cải thiện và tăng cường chức năng hô hấp cho mũi.
- Cải thiện triệu chứng nghẹt mũi, viêm mũi tái phát ở phụ nữ mang thai
- Giảm tình trạng khô mũi, "chảy máu cam" do ở nơi có thời tiết khí hậu hanh khô, lạnh, độ ẩm không khí thấp.
- Làm sạch, dưỡng ẩm và làm dịu các vùng mô mũi bị kích thích.
- Cải thiện vị giác.
- Giảm chứng ngứa ngáy và cải thiện hô hấp trong khi ngủ.
- Làm sạch mũi trước và sau quá trình phẫu thuật để ngăn ngừa nhiễm trùng.

**KHI NÀO CẦN RỬA MŨI ?**

- Vệ sinh mũi hằng ngày, làm sạch mũi xoang.
- Khi thời tiết thay đổi, khí hậu khô, điều hòa.
- Sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm như: tham gia giao thông; làm việc ở nơi nhiều khói bụi, hơi độc; lính cứu hỏa, công nhân hầm lò, công nhân nhà máy xi măng,...
- Làm việc ở nơi nhiều tác nhân gây bệnh (khám và chăm sóc bệnh nhân, kiểm dịch động vật, giết mổ gia cầm, gia súc, chăm sóc vật nuôi, phun thuốc bảo vệ thực vật, tẩy độc môi trường).

**BỘ DỤNG CỤ RỬA MŨI**

- Đầu vòi hình sen làm từ chất liệu silicon y tế (có hai đầu riêng biệt cho người lớn và trẻ em), phù hợp với mọi độ tượng.
- Công nghệ chuyển giao đến từ nhật bản.
- Hình thức tinh tế ,tiện dụng chất liệu cao cấp và an toàn..
- Thân bình đàn hồi tốt.
- Được thiết kế dựa trên kết cấu sinh lý khoang mũi.

Cấu tạo với hệ thống van một chiều ngăn cản sự nhiễm bẩn trở lại. Van khí điều hòa áp suất trong bình giúp dòng chảy liên tục và sửa sạch hiệu quả hơn. Van nước ngăn ngừa dung dịch chảy ngược vào bình cùng với dòng chảy lớn giúp rửa sạch hơn dạng phun sương. Hai van này hoạt động song song và phối hợp nhịp nhàng giúp quá trình rửa mũi trở nên dễ dàng hơn, thoải mái, thư giãn, hiệu quả.

**Ưu điểm:** dễ dàng kiểm soát áp lực, dễ dàng sử dụng, nhỏ gọn, dễ tháo lắp, an toàn sử dụng.

**Nasal Cleans**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM VỆ SINH KHOANG MŨI, SÂU VÀ KHÁNG KHUẨN

**GÓI MUỐI SINH LÝ BEBEMARK**

- Muối biển tinh khiết giàu khoáng chất được chứng minh tốt cho niêm mạc mũi hơn muối thông thường, được nhập khẩu Đạt tiêu chuẩn được điểm Nhật Bản, Hoa kỳ (USP)
- Không gây nóng rát, khô mũi.
- Không chứa chất bảo quản.
- An toàn với mọi lứa tuổi.

**LƯU Ý**

- Đây là dụng cụ vệ sinh cá nhân không nên dùng chung.
- Nên thay thế sau 6 - 12 tháng sử dụng.
- Không rửa mũi nếu bạn vừa phẫu thuật tai. Vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ nếu đã từng phẫu thuật tai.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Dùng gói muối được phẩm rửa mũi xoang 2,7g cho vào bình dùng nước ấm (nước tinh khiết, nước RO) gần với nhiệt độ cơ thể để dễ hòa tan hỗn hợp muối.
- Cúi người về phía trước một cách thoải mái, tay cầm bình chếch 1 góc 30° - 40° đặt phần đỉnh đầu vòi hình sen vào 1 bên mũi, tay bóp nhẹ nhàng thân bình từng nhịp để nước chảy ra mũi bên kia mang theo các chất nhầy bụi bẩn trong khoang mũi ra ngoài, cho tới khi hết lượng nước từ 1/2 đến 1/4 trong bình. (Một lượng nước nhỏ có thể chảy xuống miệng, chỉ cần nhổ ra, không được nuốt)
- Lặp lại theo thao tác với bên mũi còn lại.
- Để không còn dung dịch trong mũi nghiêng đầu về phía trước và về bên mũi vừa rửa và hỉ nhẹ.
- Rửa sạch bộ dụng cụ, để nơi khô ráo.

CT CP SX & XNK VINH PHÁT  
Số 72 Ngõ 318 Đường La Thành, Đống Đa Hà Nội  
Sản xuất theo Tiêu chuẩn:  
TCCS Số 04-TBYT-2021-VP

**SẢN PHẨM TỪ THIÊN NHIÊN**

**BEBEMARKS**

**MUỐI RỬA MŨI XOANG**

**NATTRICOLORID (USP) NATRIBICARBONATE (USP)**  
*Cleas , Moistens & Protets The nose 2,7g*

**Cách dùng:**  
Hòa 1 gói 2,7g với 300ml nước cất, nước tinh khiết lọc qua màng RO, nước đun sôi, để gần với nhiệt độ cơ thể, rửa mũi với dụng cụ chuyên dụng.bebemarks

CÔNG TY CP SX & XNK VINH PHÁT  
Địa Chỉ: 56 72/318 Đ. La Thành, Đống Đa, Hà Nội  
Hotline: 024 62752789. 0986 266 116