



DE Einweg-Schlauchset
EN Tubing set, disposable
FR Tuyau stérile à usage unique
IT Deflusso semplice, sterile
ES Set de tubos, estéril

REF 6022

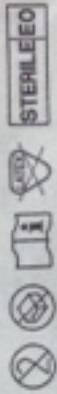

DE Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist!
EN Do not use if packaging is damaged!
FR Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé!
IT Non utilizzare se l'imballaggio è rotto!
ES Cierre el cabezal de la bomba - La bomba está lista para funcionar!

NOUVAG AG Tel.: +41 71 846 66 00
 St. Gallerstr. 23 - 45 Fax: +41 71 845 35 36
 CH-9403 Goldach E-Mail: info@nouvag.com
 www.nouvag.com

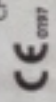

Dispenser DP 30 / DP 30 LipoPlus / LipoSurg



DE Pumpenkopf öffnen und den Schlauch einlegen (Durchflussrichtung beachten)
EN Open the pump head and insert the tube (note the flow direction)
FR Ouvrir la tête de la pompe et mettre le tuyau dans la pompe (faire attention à la direction d'écoulement)
IT Aprire la testa della pompa e inserire il tubo nella pompa (fare attenzione al senso della circolazione)
ES Abra el cabezal de la bomba e introduzca el tubo en la bomba (Atención a la dirección del tráfico)



DE Den Pumpenkopf wieder schließen - Die Pumpe ist betriebsbereit
EN Close the pump head - The pump is ready for operation
FR Fermer la tête de la pompe - La pompe est en état de fonctionnement
IT Chiudere la testa della pompa - La pompa è pronta ad operare
ES Cierre el cabezal de la bomba - La bomba está lista para funcionar