

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH

Địa chỉ: nhà A, số 85 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIÁ TREO GIƯỜNG/ GIÁ TREO ĐA NĂNG

Mô tả chung

- Là phụ kiện đi kèm máy hút áp lực âm Suprasorb CNP P3
- Giá làm bằng sắt, được sơn lớp sơn tĩnh điện bên ngoài, gồm 2 loại: Giá treo giường và giá treo đa năng.

Chỉ định

- Sử dụng để treo máy hút áp lực âm lên đầu giường trong khi bệnh nhân đang điều trị hoặc treo lên cây treo, xe lăn,... cho bệnh nhân muốn di chuyển.

Cách sử dụng

- Đặt máy vào trong giá treo
- Đóng chốt khóa và cố định giá treo vào giường hoặc cây treo
- Đảm bảo giá được cố định chắc chắn vào thành giường hoặc cây treo,... tránh rung lắc máy.

Cảnh báo và thận trọng

- Đảm bảo máy được cố định chắc chắn vào giá treo trước khi cố định giá

Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm ướt
- Bảo quản trong vali chuyên dụng cùng máy hút áp lực âm Suprasorb CN P3 khi không sử dụng