

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Liên doanh Dược phẩm ESSEN – Đức

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Phường Hữu Nghị, Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Tên trang thiết bị y tế: DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Chủng loại/module: BẢO VIỆT

Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Tháo nắp bảo vệ đầu nhấn
- Bước 2: Xoay vòi xịt theo hướng vuông góc với thân lọ
- Bước 3: Đưa đầu vòi phun sương vào khoang miệng
- Bước 4:
 - + Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Xịt vào họng ngày 4 – 6 lần, mỗi lần xịt 2 – 4 nhíp
 - + Trẻ em từ 2 – 6 tuổi: Xịt 2-4 lần/ngày, mỗi lần xịt 1-2 nhíp
 - + Trẻ từ 1-2 tuổi: Xịt 2-3 lần/ngày, mỗi lần xịt 1-2 nhíp
 - + Trẻ dưới 1 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc

Lưu ý: Không ăn uống trong vòng 20p sau khi xịt

