

BĂNG DÍNH (BĂNG KEO) Y TẾ (ĐA CHỦNG LOẠI – ĐA KÍCH THƯỚC)

Sterilized Wound Pad (Multi categories- Multi size)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mô tả sản phẩm

Băng dính (Băng keo) y tế có thể có loại vô trùng hoặc không vô trùng tùy thuộc vào mục đích sử dụng, có nhiều chủng loại khác nhau về vật liệu, kích thước, với thiết kế dạng cuộn, dạng miếng với biên dạng thiết kế khác nhau, có thể kèm lớp gạc độ thấm hút cao, được phủ lớp keo acrylic ít gây dị ứng với độ bám dính cao. Băng dính (băng keo) là sản phẩm băng keo y tế, được sử dụng dán cố định bảo vệ vết mổ, vết thương, cố định ống thông, kim lườn...

2. Chỉ định

Dán cố định bảo vệ vết mổ, vết thương, cố định ống thông, kim lườn...

3. Chống chỉ định

Không sử dụng cho những bệnh nhân bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

4. Thận trọng

- + Sản phẩm vô khuẩn, chỉ sử dụng một lần
- + Sử dụng sản phẩm nguyên vẹn, không bị mở hay hư hỏng để đảm bảo vô trùng
- + **Hướng dẫn quy trình thao tác sử dụng**

- *Bước 1:* Làm sạch vết thương
- *Bước 2:* Khử trùng vết thương bằng các dung dịch sát khuẩn chuyên dụng như NaCl đẳng trương.
- *Bước 3:* Lau khô vết thương.
- *Bước 4:* Có thể dùng thêm thuốc để làm bằng phẳng vết thương lõm và giúp vết thương mau lành.
- *Bước 5:* Lấy băng dính ra khỏi bao bì, dán băng dính lên vùng vết thương cần che phủ, hoặc vị trí cần cố định ống thông, kim lườn...
- *Bước 6:* Nên thay băng dính mỗi 24 giờ đến 48 giờ tùy điều kiện vết thương.

5. Lưu ý khi sử dụng

- Sản phẩm chỉ dùng một lần. Nguy cơ nhiễm trùng nếu tái sử dụng sản phẩm.



- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì bị hỏng.
- Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn sử dụng.
- Không được tái tiệt trùng sản phẩm.

6. Bảo quản

- a. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và trong điều kiện kín.
- b. Tránh va đập và ánh sáng trực tiếp

7. Hạn sử dụng

Hạn sử dụng được in trên nhãn sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn sử dụng.

Người đại hiện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



VĂN THỊ YẾN NHI

