

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ truyền thuốc

Chủng loại: 2 Port Manifold Set, 3 Port right Manifold Set

## 1. Tiệt trùng, cảnh báo:

Dụng cụ được tiệt trùng bằng ethylene oxide.

Không được tái sử dụng dụng cụ. Việc tái sử dụng có thể làm thay đổi chất lượng của dụng cụ hoặc gây nhiễm khuẩn chéo.

## 2. Mô tả:

+ Là một bản nhựa có 2 hoặc 3 khóa vặn. Hai đầu bản nhựa là hai đầu nối, 1 đầu male và 1 đầu female.

+ Mỗi khóa vặn có gắn với 1 đầu nối female.

+ Đối với manifold 2 cổng, khóa vặn female được nối với dây theo dõi áp lực và dây truyền cảm quang.

+ Đối với manifold 3 cổng, khóa vặn female được nối với dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch và dây truyền thuốc cảm quang.

## Chỉ định:

Dụng cụ làm đường truyền thuốc cảm quang, thuốc và theo dõi áp lực động tĩnh mạch trong suốt thủ thuật.

## 3. Hướng dẫn sử dụng:

+ Mở bao bì. Trước khi mở bao bì, cần quan sát xem bao bì có bị rách hoặc hư hỏng không. Nếu có, dụng cụ không được tiếp tục sử dụng

+ Đầu female của manifold được gắn vào đầu xa catheter, đầu male gắn với 1 ống chính.

Đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc



Nguyễn Đình Tường Thọ