



# **CÔNG TY TNHH TM TBYT HOÀNG THỊNH PHÁT**

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955

Email : [htpmedical@hoangthinhphat.vn](mailto:htpmedical@hoangthinhphat.vn) - [htpmedical@gmail.com](mailto:htpmedical@gmail.com)

HOANGTHINHPHAT.VN

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ GIÚP THỞ BẰNG TAY (AMPU BÓP BÓNG)**

Móc họng bệnh nhân lấy dị vật (nếu có)

Lau sạch miệng và mũi bệnh nhân

Áp sát mặt nạ vào mũi và miệng người bệnh

Thực hiện kỹ thuật bóp bóng đưa khí vào phổi bệnh nhân


Bóp đều đặn từ 12 – 14 lần/ phút đối với người lớn và 25 – 30 lần/ phút đối với trẻ em. Khi bóp quan sát lồng ngực của người bệnh xem có phồng lên không? Quan sát vùng thượng vị xem có chướng không?

Bóp bóng cho đến khi người bệnh tỉnh lại hoặc thở lại, đồng tử co (trừ trường hợp răn cấp nia cần, đồng tử không co).

Phối hợp bóp bóng Ambu với ép tim ngoài lồng ngực nếu có ngừng tuần hoàn.

Bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo

Giám Đốc

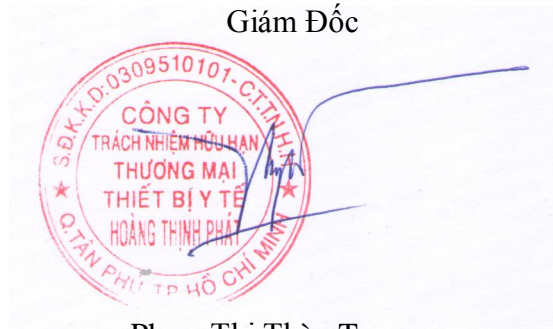

Phạm Thị Thùy Trang