

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRÒNG KÍNH ESSILOR



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Đóng gói: 01 tròng kính/ bao bì

Hướng dẫn sử dụng :

- Lắp tròng kính vào gọng kính và đeo trước mắt.

Chỉ định:

- Tròng kính (cận viễn loạn) chỉ định cho người mắc tật khúc xạ (Cận thị, Viễn thị, Loạn thị, Lão thị). Đơn kính phải do thầy thuốc nhãn khoa chỉ định sau khi đã tiến hành khám mắt toàn diện.

Cảnh báo và thận trọng

- Không phù hợp với một số môn thể thao, đặc biệt là thể thao mạnh.
- Dễ bị dính hơi nước do nước nóng, thức ăn nóng, bơi, mưa, thời tiết thay đổi đột ngột.
- Khi trầy xước thì khó khôi phục, nếu khôi phục thì mất nhiều thời gian, tiền, và cần đến chuyên gia (mặc dù kính hầu như rất bền và chống xước tốt)
- Đối với loại kính thủy tinh thì rất dễ bị vỡ và khó bảo quản

Tác dụng phụ có thể xảy ra

- Đeo kính không phù hợp với thị lực của mắt sẽ làm cho mắt nhìn không rõ, không thoải mái, hoặc có thể gây nhức thị.
- Đeo kính cao hơn độ của mắt (trường hợp cận thị) có thể gây nhức mỏi mắt hoặc rối loạn điều tiết như nhức đầu, nhức mắt, chóng mặt....

Bảo quản

- Không nhúng kính vào nước nóng, không sấy kính, không mang kính vào phòng tắm hơi. Không để kính trong ô tô khi để xe ngoài trời nắng. Không để kính trong cốp xe tay ga.
- Khi không dùng kính nên lau chùi sạch rồi cho kính vào hộp. Không để kính cùng với những đồ dùng lộn xộn khác như chìa khóa.... để tránh kính bị va chạm, giữ kỹ bề mặt kính khỏi bị ma sát.

- Khi đặt kính lên mặt bàn, không được đặt bề mặt tròng kính tiếp xúc với mặt bàn
- Thường xuyên rửa kính bằng nước tẩy nhẹ như nước rửa chén, sữa rửa tay..., lau sạch mắt kính bằng khăn chuyên dùng. Không lau mắt kính bằng vật quần áo hoặc các vật dụng khác.
- Tránh tuyệt đối dùng cùn, kem đánh răng hay các chất tẩy rửa mạnh khác để lau chùi mắt kính.
- Nên dùng hai tay cầm hai bên gọng kính khi đeo và tháo kính để tránh làm biến dạng gọng kính.
- Nên thường xuyên kiểm tra và vặn chặt ốc vít để tránh mắt kính bị rơi ra. Nên chỉnh sửa gọng kính thường xuyên để đảm bảo gọng kính luôn cân đối vừa vặn với khuôn mặt. Điều này vừa có tác dụng thoải mái khi đeo kính vừa đảm bảo độ quang sai của mắt cũng như khoảng cách đồng tử chính xác

Nhà sản xuất và phân phối, bảo hành:

Công Ty TNHH Trung Tâm Công Nghệ Essilor Việt Nam

Phòng 2, Lầu 6, Tòa nhà PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +842 8 73001980. Email: etc.info@essilor.vn