










HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

Hãng sản xuất: Shanghai Mediworks Precision Instruments Co., Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

1. Các dòng sinh hiển vi

<p>S280S/ S280C</p>	  
<p>S280C</p>	  
<p>S360/ S360S</p>	  

S390H/ S390L



S350/ S350S



S350C



<p>S260/ S260S</p>	  
<p>Nhãn áp kế T170 Có 2 phiên bản T170T và T170R có đế gắn khác nhau tùy thuộc yêu cầu người sử dụng</p>	

2. Những lưu ý khi sử dụng máy

- Khi sử dụng không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào máy, ánh sáng mạnh có thể ảnh hưởng đến kết quả của phép đo
- Dầu vân tay hoặc những chất bẩn khác trên bộ phận quang học có thể gây ra lỗi hoặc ảnh hưởng tới kết quả phép đo. Giữ cho bộ phận quang học ở phía bệnh nhân luôn sạch sẽ
- Tuyệt đối không sử dụng các dung dịch như cồn hoặc benzen pha loãng... để lau bụi trên máy tính vì có thể gây hỏng máy
- Nếu máy bị nóng đột ngột tại các vùng lạnh cần đợi cho đến khi giảm nhiệt trước khi đo
- Nếu có âm thanh lạ, khói hoặc mùi lạ trong khi làm việc, tắt nguồn điện, ngừng sử dụng và báo với nhà phân phối
- Tham khảo ý kiến của nhà phân phối trước khi kết nối máy với thiết bị khác

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Trước khi sử dụng

- Sau khi mở hộp, xác nhận rằng tất cả các phụ kiện đi kèm đầy đủ và không có phụ kiện nào hư hỏng. Các nhãn dán chỉ thị đầy đủ. Nếu có hư hại hoặc thiếu sót, liên lạc ngay với nhà phân phối sản phẩm
- Đặt thân máy cố định vào vị trí trên bàn để lắp đặt, khoan các lỗ tương ứng trên bàn và bắt vít
- Kết nối nguồn điện
- Lắp giấy tỳ cầm

3.2. Xử lý và vận hành

- Bật công tắc đèn chiếu sáng
- Tắt/bật ánh sáng đèn nền
- Thay đổi độ phóng đại
- Điều chỉnh khe sáng
- Điều chỉnh lọc màu
- Điều chỉnh khúc xạ cho bác sĩ
- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử
- Điều chỉnh độ cao tỳ cầm
- Thực hiện khám mắt cho bệnh nhân
- Hình ảnh mắt bệnh nhân được truyền trực tiếp ra màn hình hiển thị thông qua cổng HDMI

4. Cảnh báo và thận trọng

- Tháo bộ cấp nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài. Bụi tích tụ trên phích cắm có thể gây cháy
- Khi không dùng thiết bị, dùng bao che đây để che bụi cho thiết bị
- Không bảo quản thiết bị tại nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhiệt độ cao, độ ẩm cao hoặc nơi có thể bị ảnh hưởng bởi không khí chứa bụi, muối hoặc lưu huỳnh. Điều này có thể gây ra lỗi hoặc sự cố.

(Tham khảo **Hướng dẫn sử dụng** bằng Tiếng anh kèm theo máy)