



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

Neodisher®PreStop
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Đức

TÊN SẢN PHẨM: Dung dịch kiểm khuẩn, ức chế ăn mòn bề mặt dụng cụ y tế

(Neodisher PreStop)

CHÙNG LOẠI/MÃ SẢN PHẨM: Neodisher PreStop (Code: 408647)

NHÀ SẢN XUẤT: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & CO.KG

XUẤT XỨ: Đức

CHỈ ĐỊNH: Bột xịt ức chế ăn mòn bề mặt các dụng cụ phẫu thuật và dụng cụ MIS, giữ ẩm dụng cụ và ngăn ngừa sự phát sinh và phát tán của các vi khuẩn trên dụng cụ ngay sau khi phẫu thuật.

THÀNH PHẦN: Enzymes, <5% chất hoạt động bề mặt anion và lưỡng tính, chất bảo quản (3-Iodo-2-propinyl butylcarbamate, 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one).

ĐẶC TÍNH: Cơ chế tự làm sạch khi bao phủ bề mặt dụng cụ ngay sau khi phẫu thuật. Giữ bề mặt dụng cụ luôn ẩm, ngăn máu khô hình thành. Ức chế sự tăng sinh của vi sinh vật. Dụng cụ được xử lý với neodisher®PreStop có thể lưu trữ trong vòng 72h trước khi xử lý tiếp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Xịt trực tiếp neodisher®PreStop lên bề mặt dụng cụ, đảm bảo phủ kín toàn bộ bề mặt. Xả sạch dụng cụ trước khi đưa dụng cụ vào bước xử lý tiếp theo. Cần đậy kín nắp hộp dụng cụ sau khi xịt.

KHUYẾN CÁO:

Chỉ được sử dụng bởi người có chuyên môn.

Không pha trộn với các sản phẩm khác.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ: 0 - 25°C

SỐ LOT VÀ HSD: Xem trên nhãn chính của sản phẩm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 0.75 lít/Bình

SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:

HẠN SỬ DỤNG: 2 năm

ĐƠN VI NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:

Công Ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Long.

Địa chỉ: B16, TT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: (024) 2264 5566