

Tp.HCM, Ngày 24 tháng.01 năm 2022

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY TRUYỀN DỊCH

**I. Tên sản phẩm:** Dây truyền dịch

**II. Cấu trúc và đặc điểm:**

1. Dây truyền dịch bao gồm các thiết bị đóng lỗ thủng, vỏ bảo vệ, dây lọc không khí, ống mềm, ống nhỏ giọt, bầu nhỏ giọt, dây điều chỉnh lưu lượng, dây lọc chất lỏng, bao gồm kim tiêm truyền tĩnh mạch.
2. Ống tiêm được khử trùng bằng EO, phải vô trùng, không độc hại, không chứa pyrogen, không phản ứng tan máu.

**III. Phương pháp:**

1. Sử dụng ngay sau khi tháo niêm phong (bao gói), Đầu tiên tháo bao bì, dụng cụ chọc dò sẽ được đưa vào các chai (túi) dịch truyền, đuổi hết khí trong dây truyền và sau đó chọc dò tĩnh mạch.
2. Sử dụng con lăn điều chỉnh lưu lượng, sao cho lưu lượng chất lỏng phù hợp với yêu cầu.
3. Trước khi sử dụng, kim tiêm truyền tĩnh mạch cần gắn khớp, chặt chẽ để tránh rò rỉ.

**IV. Lưu ý:**

1. Chỉ sử dụng một lần, bỏ đi sau khi sử dụng.
2. Kiểm tra trước khi sử dụng, không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng, bẩn.
3. Được sử dụng bởi những y bác sĩ, điều dưỡng chuyên nghiệp ..

**V. Thời hạn sử dụng:** 5 năm

**VI. Lưu trữ:** Bảo quản ở độ ẩm tương đối không quá 80%, trong phòng không có môi trường ăn mòn và thông gió tốt.



*ThS. Huỳnh Chí Quốc*