



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SHEATH FOR HEMATOLOGY ANALYZER

Đề mục	Nội dung
Mô tả tổng quát	Tên thuốc thử: Sheath For Hematology Analyzer Dạng bảo chế: chất lỏng Quy cách đóng gói: 1 thùng/20 lít Dung dịch dạng lỏng, hỗn hợp hoạt động bề mặt không chứa ion, đựng trong bóng nhựa 20 lít
Mục đích sử dụng	* Dùng pha loãng mẫu xét nghiệm (máu toàn phần) trong quá trình vận hành của máy * Hóa chất xét nghiệm này chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro (IVD)
Các thông tin liên quan đến sự an toàn/hiệu quả của sản phẩm	Khi các thùng thuốc bị va đập, rơi mạnh làm vỡ, nứt thùng chứa thuốc sẽ không đảm bảo đủ dung dịch để có thể xét nghiệm trên máy. Cần thay thế thùng thuốc khác bảo đảm để cho kết quả xét nghiệm chính xác. Không được uống, tránh tiếp xúc trực tiếp vào da, mắt, nếu có rửa sạch trên vòi nước đang chảy
Hướng dẫn sử dụng	Mở nắp thùng hóa chất Sheath, đưa hóa chất vào công hút tương ứng. Chọn chế độ trên máy, sau khi hút hóa chất máy sẽ tự động thực hiện các bước đến khi báo hoàn thành.
Chống chỉ định	Hóa chất xét nghiệm này chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro (IVD) và không sử dụng cho các mục đích khác theo khuyến cáo. Chỉ được sử dụng bởi các nhân viên chuyên môn.
Cảnh báo và thận trọng	* Không sử dụng thuốc hết hạn và hộp thuốc có dấu hiệu rơi vỡ. * Không để nhiệt độ âm * Sau khi mở thùng hóa chất phải sử dụng hết trong vòng 60 ngày. * Không được uống, tránh tiếp xúc trực tiếp vào da, mắt. Nếu có rửa sạch với vòi nước đang chảy.
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	* Có khả năng gây kích ứng khi tiếp xúc trực tiếp với da thời gian lâu. * Kết quả xét nghiệm có thể bị sai nếu khi không thực hiện đúng các yêu cầu. * Sử dụng thuốc hết hạn hoặc thuốc bị lỗi kỹ thuật
Thông tin về nguyên vật liệu	Dung dịch không màu
Các thông số kỹ thuật có liên quan	* Hạn dùng: trên 01 năm kể từ ngày sản xuất. * Bảo quản: nhiệt độ phòng * Vận chuyển: nhẹ nhàng, tránh va đập.