

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chung loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Đèn mổ tiểu phẫu SOLED15 (di động, treo trần hoặc gắn tường - độ sáng 65.000-85.000 lux)</p> <p>Mô tả chung SOLED 15 là loại đèn LED dành cho việc khám bệnh, tiểu phẫu thuật và các ứng dụng khác. Đèn có thể dùng trong phòng hồi sức cấp cứu, thẩm mỹ và nha khoa. SOLED15 bổ sung đầy đủ cho hệ thống đèn mổ sản xuất bởi công ty ACEM.</p> <p>SOLED 15 có đầy đủ các ưu điểm của công nghệ LED và phù hợp cho nhiều ứng dụng nhờ tính linh hoạt của nó. Nó đảm bảo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cường độ ánh sáng hoàn hảo• Tia sáng không có tia hồng ngoại• Nhiệt độ màu (CCT) 4.500°K• Chỉ số biểu diễn màu (CRI) 95• Tuổi thọ cao• Tiêu thụ năng lượng thấp <p>Nhờ việc kết hợp giữa trình độ công nghệ cao và đèn LED hiệu năng cao, đèn SOLED15 đảm bảo việc hoạt động thông suốt trong suốt vòng đời của nó. Nhờ đạt được hiệu năng cao, SOLED15 đạt được cường độ sáng 65.000 lux hoặc lên tới 85.000 lux với tính năng "Boost" (kích) và đạt được lượng tiêu thụ điện năng thấp. Các bóng LED tạo ra sự thoải mái về trực quan, đồng thời tạo ra ánh sáng đồng nhất và không đồ bóng.</p> <p>SOLED15 có hình dạng tròn giúp nó dễ dàng sử dụng và di chuyển. Kết cấu dễ di chuyển không chỉ phù hợp cho việc thăm khám, phòng nha mà tay nắm có thể hấp tiệt trùng được còn giúp nó được vệ sinh lau chùi dễ dàng.</p> <p>SOLED15 được cung cấp kèm bảng điều khiển cảm ứng chạm I-SENSE (công nghệ độc quyền của ACEM), cho phép điều khiển các tính năng ON/OFF - bật/tắt Điều chỉnh cường độ sáng SEL - chọn bật một phần đèn Kích ánh sáng (Boost)</p> <p>Tính năng "SEL" cho phép chọn chỉ một khu vực của bóng đèn bật lên theo nhu cầu của người sử dụng. Tính năng Kích ánh sáng (Boost) cho phép đạt được cường độ tối đa trong khu vực rộng. Nó</p>

		có thể giúp tăng 20% công suất và tự động ngừng kích sau 5 phút.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	SOLED 15 là loại đèn LED dành cho việc khám bệnh, tiểu phẫu thuật và các ứng dụng khác.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra nguồn điện 230V. Cắm điện và bật công tắc đèn. - Khi ấn nút bật mà đèn không sáng: kiểm tra nguồn điện của thiết bị, kiểm tra phích cắm và dây điện. - Nếu phần dây điện của đèn bị hỏng, thì dây điện cần được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên được đào tạo của hãng. - Với các vấn đề khác vui lòng liên lạc với bộ phận quản lý chất lượng.
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra nguồn điện 230V - Phải đóng nắp bảo vệ thấu kính ngay cả khi không sử dụng. Chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng bảo vệ thấu kính CP/300 của chính hãng. - Nên ngắt điện bằng cách rút phích cắm khi cần sửa chữa, thay thế đèn led hoặc lau chùi đèn. - Người sử dụng lưu ý không được sửa đổi, thay thế (dù nhỏ) các bộ phận không chính hãng. Hãng sản xuất không có trách nhiệm bảo hành nếu có vấn đề xảy ra khi sử dụng, thay thế các bộ phận không chính hãng. - Không được để thấu kính ra khỏi phần bảo vệ thấu kính và tránh ánh sáng mặt trời vì sẽ có thể gây ra cháy và các trường hợp nghiêm trọng khác
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước - Không có	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác - Không có	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế - Không có	

Đơn vị nhập khẩu

