



## **Hướng dẫn sử dụng nhanh Đèn mô**

### **Lưu ý vận hành:**

- Kiểm tra nguồn điện 230V
- Phải đóng nắp bảo vệ thấu kính ngay cả khi không sử dụng. Chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng bảo vệ thấu kính CP/300 của chính hãng.
- Nên ngắt điện bằng cách rút phích cắm khi cần sửa chữa, thay thế đèn led hoặc lau chùi đèn.
- Người sử dụng lưu ý không được sửa đổi, thay thế (dù nhỏ) các bộ phận không chính hãng. Hãng sản xuất không có trách nhiệm bảo hành nếu có vấn đề xảy ra khi sử dụng, thay thế các bộ phận không chính hãng.
- Không được để thấu kính ra khỏi phần bảo vệ thấu kính và tránh ánh sáng mặt trời vì sẽ có thể gây ra cháy và các trường hợp nghiêm trọng khác.

### **Hướng dẫn xử lý kỹ thuật:**

- Khi ấn nút bật mà đèn không sáng: kiểm tra nguồn điện của thiết bị, kiểm tra phích cắm và dây điện.
- Nếu phần dây điện của đèn bị hỏng, thì dây điện cần được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên được đào tạo của hãng.
- Với các vấn đề khác vui lòng liên lạc với bộ phận quản lý chất lượng.
- Các điều kiện để được bảo hành:
  - Thiết bị được bảo hành 1 năm. Thiết bị được bảo hành khi:
    - Thiết bị không bị giả mạo
    - Thiết bị được sử dụng đúng mục đích
    - Thiết bị được sửa chữa bởi kỹ thuật viên được đào tạo của hãng.