

# Nhãn chai

DUNG DỊCH XỊT MŨI  
**VIRNOSE**  
ISO 13485:2016 - Tiêu chuẩn: TCCS  
NGƯỜI LỚN & TRẺ EM

**VIRNOSE** DUNG DỊCH XỊT MŨI

**Thành phần:** Xem thông tin trên hộp.  
**Công dụng:** Xem thông tin trên hộp.  
**Liều dùng:** Dùng an toàn cho trẻ nhỏ trên 2 tuổi và người lớn.  
Tư thế đứng hoặc ngồi, mắt nhìn thẳng.  
- Người lớn: Sử dụng 4 - 6 lần/ngày, mỗi bên 1 - 3 nhát xịt.  
- Trẻ em trên 2 tuổi: Sử dụng 2 - 3 lần/ngày, mỗi bên 1 - 2 nhát xịt.  
\* Lau sạch vòi xịt, đậy kín.  
**Thận trọng:** không dùng cho người mắt cảm với các thành phần của sản phẩm. Trẻ em dưới 2 tuổi.

Herbal Nasal Spray  
**30ml (1.0 fl.oz)**

DUNG DỊCH XỊT MŨI  
**VIRNOSE**  
Nano Silver - Herba Agerati - Oleum Cajepuili




Nano Silver  
Herba Agerati  
Oleum Cajepuili

NGƯỜI LỚN & TRẺ EM

**Đối tượng sử dụng:**  
Xem thông tin trên hộp.  
ISO 13485:2016 - TCCS  
**SDK:** /PCBA-LA  
**Bảo quản:**  
Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  
Tiếp thị & Phân phối:  
**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LYN - KOREA**  
29 Đường số 25, P. Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh  
Nhà máy sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN**  
Xưởng K2-1, KCN Tân Kim Mỹ Rộng, TT. Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

Lot NO: Exp: 

DUNG DỊCH XỊT MŨI  
**VIRNOSE**  
Nano Silver - Herba Agerati - Oleum Cajepuili



**Ngăn ngừa VI KHUẨN, VIRUS** gây bệnh qua đường hô hấp.  
**Bảo vệ NIÊM MẠC MŨI,** giảm nghẹt mũi, **VIÊM XOANG.**  
**DIỆT KHUẨN,** kháng viêm.


GMP-WHO **30ml**

Dung Dịch Xịt Mũi  
**VIRNOSE**

**Thành phần:**  
Tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu trầm trà, tinh dầu trầm gió, tinh dầu bạc hà, tinh dầu hoa ngũ sắc, Nano Silver, Pure sodium chloride, nước tinh khiết vừa đủ 30ml.  
**Công dụng:**  
- Làm sạch vùng khoang mũi, xoang, nhanh chóng làm dịu mũi bị tắc.  
- Bảo vệ niêm mạc mũi, kháng viêm như viêm mũi, viêm xoang.  
- Ngăn ngừa vi khuẩn, virus gây bệnh qua đường hô hấp.  
**Đối tượng sử dụng:**  
Người bị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm xoang mũi, người làm trong môi trường khói bụi ô nhiễm, người bị viêm mũi dị ứng hay ngăn ngừa các tác nhân gây viêm nhiễm đường hô hấp do vi khuẩn, virus..  
**Hướng dẫn sử dụng:**  
Tư thế đứng hoặc ngồi, mắt nhìn thẳng.  
- Lắc đều chai xịt, dùng vòi phun sương xịt sâu vào trong mũi, bấm xịt 1-3 nhát mỗi bên. Dùng 1-3 lần/ngày.  
- Lau sạch vòi xịt, đậy kín.

NGƯỜI LỚN & TRẺ EM

DUNG DỊCH XỊT MŨI  
**VIRNOSE**  
Nano Silver - Herba Agerati - Oleum Cajepuili





**Ngăn ngừa VI KHUẨN, VIRUS** gây bệnh qua đường hô hấp.  
**Bảo vệ NIÊM MẠC MŨI,** giảm nghẹt mũi, **VIÊM XOANG.**  
**DIỆT KHUẨN,** kháng viêm.

Lot NO:  
Mfg:  
Exp:

Dung Dịch Xịt Mũi  
**VIRNOSE**


**Thận trọng:** không dùng cho người mắt cảm với các thành phần của sản phẩm. Trẻ em dưới 2 tuổi.  
ISO 13485:2016 - TCCS  
**SDK:** /PCBA-LA  
**Bảo quản:**  
Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  
Tiếp thị & Phân phối:  
**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LYN-KOREA**  
29 Đường số 25, P. Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh  
Nhà máy sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN**  
Xưởng K2-1, KCN Tân Kim Mỹ Rộng, TT. Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

Lot NO:  
Mfg:  
Exp:

Hộp

DUNG DỊCH XỊT MŨI  
**VIRNOSE**  
Nano Silver - Herba Agerati - Oleum Cajepuili



**Ngăn ngừa VI KHUẨN, VIRUS** gây bệnh qua đường hô hấp.  
**Bảo vệ NIÊM MẠC MŨI,** giảm nghẹt mũi, **VIÊM XOANG.**  
**DIỆT KHUẨN,** kháng viêm.

Tiếp thị & Phân phối:  
**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LYN-KOREA**  
29 Đường số 25, P. Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

DUNG DỊCH XỊT MŨI  
**VIRNOSE**

**Thành phần:**  
Tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu trầm trà, tinh dầu trầm gió, tinh dầu bạc hà, tinh dầu hoa ngũ sắc, Nano Silver, Pure sodium chloride, nước tinh khiết vừa đủ 30ml.  
**Công dụng:**  
- Làm sạch vùng khoang mũi, xoang, nhanh chóng làm dịu mũi bị tắc.  
- Bảo vệ niêm mạc mũi, kháng viêm như viêm mũi, viêm xoang. Ngăn ngừa vi khuẩn, virus gây bệnh qua đường hô hấp.  
**Đối tượng sử dụng:**  
Người bị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm xoang mũi, người làm trong môi trường khói bụi ô nhiễm, người bị viêm mũi dị ứng hay ngăn ngừa các tác nhân gây viêm nhiễm đường hô hấp do vi khuẩn, virus..  
**Hướng dẫn sử dụng:**  
Tư thế đứng hoặc ngồi, mắt nhìn thẳng.  
- Lắc đều chai xịt, dùng vòi phun sương xịt sâu vào trong mũi, bấm xịt 1-3 nhát mỗi bên. Dùng 1-3 lần/ngày.  
- Lau sạch vòi xịt, đậy kín.  
**Thận trọng:** không dùng cho người mắt cảm với các thành phần của sản phẩm. Trẻ em dưới 2 tuổi.

**Herbal Nasal Spray**

Nhà máy sản xuất:  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA**  
Xưởng K2-1, KCN Tân Kim Mỹ Rộng, Cần Giuộc, Long An

Hướng dẫn sử dụng