

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN MỎ CLOVER SERIES YAMADA SHADOWLESS LAMP, Nhật

Hoạt động:

1. Kiểm tra đèn trước khi sử dụng, với đèn có ắc qui thì kiểm tra ắc qui xem còn không
2. Kết nối dây nguồn, (với đèn có ắc qui thì máy tự động sạc ắc qui)
3. Bật công tắc nguồn chính
4. Bật nút đèn và điều chỉnh cường độ sáng: Bật công tắc Dimming Control (kiểm soát cường độ sáng)/ công tắc nguồn ở đầu đèn). Cường độ sáng có thể điều chỉnh giữa 30% và 100% sau khi đèn bật.
5. Điều chỉnh hướng và vị trí của ánh sáng: bằng cách dùng tay cầm trung tâm ở đầu đèn di chuyển ánh sáng theo hướng và vị trí cần chiếu sáng trên bệnh nhân.
6. Tắt đèn: tắt công tắc nguồn/ xoay núm Dimming Control ở đầu đèn
7. Tắt công tắc nguồn chính khi không hoạt động
8. Vệ sinh đèn: vệ sinh bên ngoài đầu đèn sau khi sử dụng xong

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



QUẢN LÝ VP ĐẠI DIỆN
Nguyễn Quốc Tuấn