

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯỠI DAO MỎ DÙNG MỘT LẦN

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Lưỡi dao mổ, hoặc còn gọi là lưỡi dao phẫu thuật, được sử dụng để cắt da và mô trong quá trình phẫu thuật. Có nhiều loại lưỡi mổ khác nhau dành riêng cho mỗi loại thủ tục.

Lưỡi phẫu thuật thay đổi theo kích thước và hình dạng. Mỗi lưỡi dao phẫu thuật sẽ có đánh dấu theo số riêng từ 10-25, đại diện cho kích thước và hình dạng lưỡi cắt.

Sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của Dược phẩm Châu Âu và Dược điển Hoa Kỳ.

2. CHỈ ĐỊNH:

Lưỡi dao mổ được sử dụng cùng cán dao không kèm lưỡi phù hợp, dùng để rạch da, tổ chức... cho mọi chỉ định phẫu thuật đại phẫu, trung phẫu, tiểu phẫu.

3. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Việc lựa chọn lưỡi dao mổ nên dựa trên vị trí cơ cấu da, kinh nghiệm phẫu thuật, kỹ thuật phẫu thuật và kích thước vết thương.

4. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Một số tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Nhiễm trùng, chảy máu.

Lây nhiễm chéo nếu dụng cụ không được xử lý đúng cách.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không có

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG:

Sản phẩm sử dụng một lần, không được tái sử dụng.

Tái sử dụng sản phẩm dùng một lần gây nhiễm khuẩn và nguy hiểm cho bệnh nhân.

Đảm bảo thiết bị và các phụ kiện được vận hành và sử dụng bởi người đã được đào tạo, có kiến thức hoặc kinh nghiệm.

Đọc, tuân thủ và giữ gìn tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Chỉ sử dụng sản phẩm theo mục đích sử dụng của nó.

Không sử dụng sản phẩm từ bao bì tiệt khuẩn bị rách hoặc đã mở.

Trước khi sử dụng, kiểm tra xem các bộ phận sản phẩm có bị lỏng, cong, vỡ, nứt hoặc gãy không.

Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng hay bị lỗi. Để riêng sản phẩm ra nếu bị hư hỏng.

Không tiệt khuẩn lại sản phẩm.

Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Lựa chọn lưỡi dao phù hợp với cán dao, sử dụng kẹp để gấp lưỡi dao cài vào rãnh trên cán dao, sau đó sử dụng để rạch da, tổ chức... theo yêu cầu của phẫu thuật viên.

Sản phẩm được chiếu xạ/ hấp tiệt khuẩn/ tiệt khuẩn bằng khí EO và được đóng gói trong bao vô trùng.

Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Chỉ được sử dụng bởi bác sĩ, người có chuyên môn.

8. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:



Mỗi lưỡi dao có màng gói riêng trong màng tráng bạc và đóng trong 1 hộp theo quy cách: 100 lưỡi/hộp.

9. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5-30 độ C, tránh độ ẩm và ánh sáng trực tiếp.

Hạn sử dụng: Không được sử dụng sản phẩm khi quá hạn dùng. Hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.

10. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ PHÂN PHỐI:

Thông tin nhà sản xuất: SMI AG Steinerberg 8, 4780 St.Vith, Belgium.

Thông tin nhà phân phối: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hùng Mạnh.
Phòng 503A, nhà 77 TT Hóa chất, Tờ 46 A, Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Mạnh

