

Ống Tự Thông Tiểu Nữ


Pur-Cath

Cắm tái sử dụng

[Hình dạng/cấu tạo và nguyên lý]

Sản phẩm này có chất khử trùng là khí Ethylene Oxyde (khí EO).

(Hình dạng)

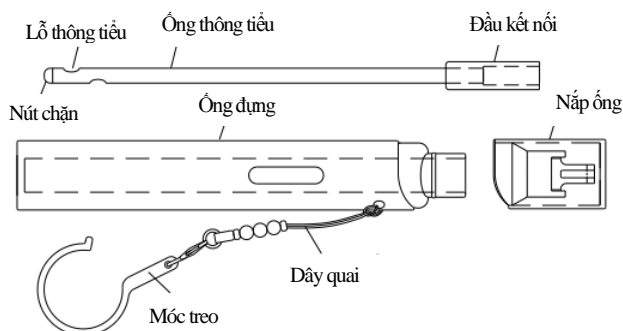

❖ Đối với ống thay thế thì không có ống đựng, nắp đậy và hộp ngoài.

Những thông số được ghi trong bảng liệt kê dưới đây là quy cách sản phẩm của công ty chúng tôi. Đối với những sản phẩm được đặt riêng xin tham khảo quy cách sản phẩm được in trên bao bì.

Size	ĐK ngoài	ĐK trong	Chiều dài	Số lỗ
9Fr	3 mm	2 mm	125 mm	2 lỗ thông
12Fr	4 mm	2.7 mm		
12Fr cứng	4 mm	2.5 mm		
14Fr	4.7 mm	3.1 mm		

(Nguyên liệu)

• Ống thông tiểu: Silicone

(Nguyên lý)

Lấy ống thông tiểu từ trong ống đựng đã được bỏ sẵn nước tiêu độc, tự mình tiến hành thông tiểu sau đó vệ sinh thật sạch và cho vào lại bên trong ống đựng, có thể bảo quản và mang đi rất tiện lợi.

(Mục đích sử dụng, tính năng và hiệu quả)

Dùng cho việc bài tiết nước tiểu. Được đặt tạm thời vào trong đường bài tiết của việc thay thế đường dẫn tiêu của bàng quang, niệu quản, niệu đạo sau khi phẫu thuật.


(Cách cách sử dụng)

Cách sử dụng bên dưới là cách sử dụng chung.

(Các bước chuẩn bị)


① Tháo nắp và lấy ống thông ra ngoài. (việc gắn kết giữa nắp ống và đầu kết nối của ống thông diễn tả về tình trạng đóng mở của ống thông khi bị ướt bởi chất dịch tiêu độc bên trong ống. Sau khi mở ra thì có 1 vài trường hợp nghiêm trọng.)

② Cho dịch tiêu độc vào trong ống đựng cho đến khi thấy mực dịch tiêu độc ở vị trí phía trên chỗ xem mực nước ở bên hông ống đựng. (khoảng 5.5 ml)

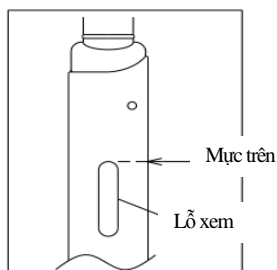

③ Gắn đầu kết nối của ống thông với nắp ống sau đó đóng nắp lại.

④ Kiểm tra xem ở vị trí đánh dấu của nắp ống và ống đựng có bị lệch hay không, đã đúng vị trí hay chưa.

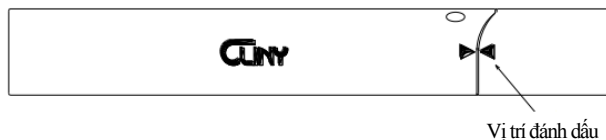

(Cách tự thông tiểu- hướng dẫn cho bệnh nhân)

① Rửa tay sạch sẽ, sau đó lau bằng khăn ướt hay bông vệ sinh.

② Kéo quần và đồ lót ra sau đó ngồi với tư thế dễ thông tiểu.

③ Một tay bành vùng âm hộ ra, tay còn lại dùng bông vệ sinh lau sạch vùng âm hộ.

④ Mở nắp ống đựng và lấy ống thông ra ngoài.

⑤ Treo ống ở một nơi thích hợp như trong toilet, tay nắm cửa... bằng móc treo của ống đựng.

⑥ Nhặt định phải bôi chất trơn lên đầu ống thông tiểu

⑦ Một tay bành vùng âm hộ ra, tay còn lại cầm ống thông như cầm bút chì và từ từ đưa vào trong âm đạo sau đó tháo nắp ống ra khỏi đầu kết nối.

⑧ Sau khi chảy ra hết thì từ từ kéo ống thông ra ngoài

⑨ Sau khi sử dụng xong thì rửa lại bằng nước sạch và thực hiện lại các thao tác từ ③ đến ⑤ để bảo quản ống thông.

(Chú ý khi sử dụng)

① Cần lưu ý việc cho ống thông vào ống đựng khi có nước tiêu độc bên trong hay cho quá nhiều nước tiêu độc vào sẽ làm cho nó bị tràn ra ngoài. Trường hợp bị tràn nước tiêu độc ra ngoài thì vệ sinh sạch sẽ sau đó bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát.

② Khi nước tiêu độc dính lên móc treo, dây quai, thân ống hay nắp ống thì không lau chà mạnh, ngoài ra không dùng cồn để lau. (sẽ làm mất chữ in trên thân ống, ngoài ra còn có thể nứt nẻ bên trong thân ống)

③ Khi đóng nắp ống hay đầu kết nối thì đưa đầu kết nối tới đúng vị trí và ấn chắc chắn vào.

④ Không kéo mạnh dây quai hay dùng móc treo để treo các vật nặng. (móc treo và dây quai được thiết kế chỉ để treo thân ống trong khi đang tiến hành thông tiểu)

⑤ Khi treo ống đựng bằng móc treo, cần lựa chọn nơi chắc chắn có thể treo được. (tránh tình trạng làm rơi ống đựng hay làm tràn nước tiêu độc ra ngoài.)

⑥ Không cố đưa ống thông vào khi gặp khó khăn. Thả lỏng cơ thể, vừa hít thở sâu và vừa từ từ đưa ống thông vào. Trong theo hướng dẫn. (sẽ dễ cho vào hơn khi bản thân Người bệnh tưởng tượng rằng đang mở lỗ niệu đạo)

⑦ Dù có để nguyên nắp ống trên ống thông rồi đưa vào thì nước Tiểu vẫn có thể chảy ra ngoài được. (Nắp ống đựng không phải vật dùng để chặn hoàn toàn đường nước tiểu).

(Chú ý trước khi dùng)

Đối với bệnh hẹp niệu đạo, cần kiểm tra xem có khả thi để thực hiện hay không. (E ngại sẽ làm tổn thương đến mô hay niêm mạc âm đạo)

(Chú ý quan trọng cơ bản)

① Việc sử dụng sản phẩm đối với bệnh nhân cần thực hiện theo sự hướng dẫn thích hợp. Việc đóng mở ống đựng hay thao tác đưa ống thông vào cần nhẹ nhàng cẩn thận không làm tổn thương cho bệnh nhân. Đối với trẻ em và người cao tuổi thì đặc biệt phải giải

thích rõ ràng để hiểu, thực hiện theo hướng dẫn. Ngoài ra cũng cần có sự hỗ trợ, cộng tác của cả gia đình và người chăm sóc trong việc giải thích đầy đủ cho người bệnh.

② Không tiết trùng hay đun sôi vì sẽ làm thay đổi hình dạng hay tính năng của sản phẩm.

③ Chiều dài của phần thông tiểu đưa vào là khoảng 110mm, nên dù là nam hay nữ thì tùy vào cơ thể của mỗi người mà đôi khi bị hệt, có trường hợp không thể tiến hành thông tiểu được.

④ Tùy vào tình trạng của nước tiểu mà có khi nước tiểu thoát ra không được tốt.

(Những sự bất tiện khi sử dụng)

Việc sử dụng sản phẩm này có thể phát sinh các trường hợp dưới đây.

- Trường hợp rửa hay tiêu độc ống thông không đúng cách sẽ làm cho đường dẫn bị tắc nghẽn, đổi màu, hay giảm chất lượng của sản phẩm.
- Không cố gắng đóng mở ống đựng hay nắp ống sẽ làm hư hại
- Việc va chạm hay làm rơi sản phẩm trong lúc bảo quản hay mang đi sẽ làm hư hại cho ống đựng hay rút móc treo ra. Ngoài ra còn làm lệch nắp đậy và làm rò rỉ nước tiêu độc bên trong ống đựng.
- Việc để nước dính lên thân ống hay nắp ống mà bảo quản thì có thể sẽ làm phai màu.
- Việc lau mạnh tay nước tiêu độc khi dính lên thân ống, nắp ống, móc treo hay dây quai có thể làm bong tróc lớp phủ ngoài hay gây hư hỏng thân ống.

(Những việc có hại khác)

- Cảm giác khó chịu, đau niệu đạo tại thời điểm đưa ống thông tiểu vào
- Nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang, bể thận...
- Tổn thương niệu đạo, xuất huyết.
- Rò rỉ nước tiêu độc. (đặc biệt là việc thay đổi áp suất khi lên máy bay, dễ phát sinh tình trạng rò rỉ nước tiêu độc.)

(Phương pháp bảo quản)

Tránh trực tiếp ánh sáng mặt trời và nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Để nơi nhiệt độ dưới 10, sạch sẽ và tránh xa tia cực tím hay đèn diệt khuẩn.

(Thời gian hiệu quả)

Trường hợp không bảo quản bằng phương pháp thích hợp, xin tham khảo thời hạn sử dụng in trên bao bì.

(Hạn sử dụng)

Thời gian sử dụng của sản phẩm mới hay ống thay thế đều là 30 ngày.

(Bảo dưỡng và kiểm tra với người sử dụng)

① Đối với mỗi bệnh nhân sẽ quy định một phương thuốc, dung dịch tiêu độc hay nồng độ thích hợp. Biểu thị ví dụ về nồng độ sử dụng tham khảo của tên thuốc. Về nồng độ sử dụng hãy cùng với bác sĩ hay những người có kinh nghiệm xem xét, cũng cần quan tâm đến tình trạng cơ thể bệnh nhân.

② Dung dịch tiêu độc 1 tuần thay 1 lần. Trường hợp không sử dụng trong thời gian dài hãy làm thật khô ống rồi bảo quản. Trong trường hợp này, thời gian sử dụng sau khi mở bao bì vượt quá thời gian quy định thì không sử dụng.

(Nhà sản xuất)

Công ty cổ phần CREATE MEDIC

Quốc gia: Nhật Bản

(Nhà phân phối)

Công ty TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC

Quốc gia: Việt Nam