



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG

29/39 Đường số 6, Kp 2, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Phone: (08) 54037942 E: huydang@eastmedical.vn
Hotline: 0975 598 995 W: www.eastmedical.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SpO₂ CẦM TAY SOLARIS - Model: NT1A

1. Jack cắm sensor SpO₂
2. Đèn báo nguồn
3. Màn hình hiển thị
4. Bàn phím
5. Mặt trước
6. Dây đeo

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG



Phím cài đặt



Tắt âm báo động




Phím nguồn



Phím tăng âm lượng nhịp tim/
Tăng giá trị cài đặt



Phím giảm âm lượng nhịp tim/
giảm giá trị cài đặt

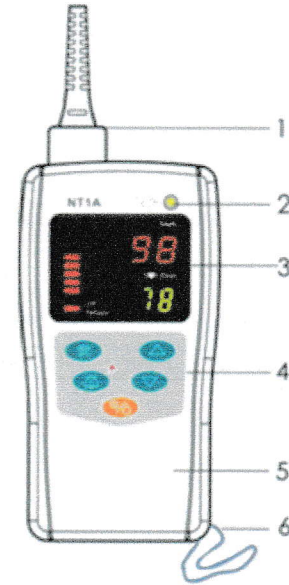

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

- 1- Cài đặt giới hạn báo động SpO₂: Ấn giữ phím → "SPH" (Giới hạn trên) → Ấn phím , để tăng, giảm giá trị cài đặt.
- 2- Cài đặt giới hạn báo động SpO₂: Ấn giữ phím → "SPL" (Giới hạn dưới) → Ấn phím , để tăng, giảm giá trị cài đặt.
- 3- Cài đặt giới hạn báo động Nhịp tim: Ấn giữ phím → "PAH" (Giới hạn trên) → Ấn phím , để tăng, giảm giá trị cài đặt.
- 4- Cài đặt giới hạn báo động Nhịp tim: Ấn giữ phím → "PAL" (Giới hạn dưới) → Ấn phím , để tăng, giảm giá trị cài đặt.
- 5- Cài đặt thời gian tạm dừng báo động: Ấn giữ phím → "Int" (Thời gian tạm dừng) → Ấn phím , để chọn OFF (Tắt báo động khi ấn phím) , chọn 15 giây, 30 giây, 60 giây, 90 giây, 120 giây (Thời gian tạm dừng báo động khi ấn phím)
- 6- Cài đặt âm lượng báo động: Ấn giữ phím → "VOL" (Âm lượng) → Ấn phím , để tăng, giảm âm lượng muốn cài đặt.
- 7- Ấn giữ phím để thoát cài đặt.



Đặng Khanh Huy
GIAM ĐOC