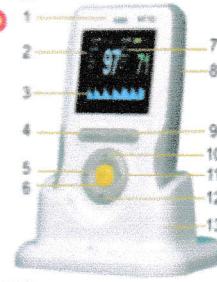










HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SpO₂ CẢM TAY SOLARIS - Model: NT1D





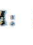
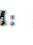

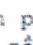
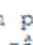
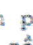
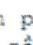


1. Đèn báo
2. SPO2 LIMIT :Thông số SpO2 và giới hạn báo động
3. Hiển thị dạng sóng
4. MENU : Danh sách cài đặt
5. LEFT : Duyệt chuyển con trỏ sang trái hoặc giảm âm lượng
6. OK : Xác nhận chế độ đã lựa chọn
7. PR LIMIT: Thông số nhịp tim và giới hạn báo động
8. POWER On/Off : Phím nguồn
9. MUTE : Tắt âm thanh báo động
10. UP: Duyệt chuyển con trỏ lên hoặc tăng giá trị cài đặt
11. RIGHT: Duyệt chuyển con trỏ sang phải hoặc tăng âm lượng
12. DOWN :Duyệt chuyển con trỏ xuống hoặc giảm giá trị cài đặt
13. CASE : Để giữ máy



-  Đang bật cảnh báo
-  Đang tắt cảnh báo
-  Đang bật âm báo
-  Đang tắt âm báo
-  Mất kết nối Sensor
-  Mất kết nối bệnh nhân
-  Pin yếu
-  Dò nhịp tim



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. MỞ /TẮT MÁY: Ấn phím  để khởi động máy, Ấn và giữ phím  trong 3 giây để tắt máy
2. TẮM DỪNG BÁO ĐỘNG: Ấn phím Mute, chỉ báo động bằng đèn
3. TẮT BÁO ĐỘNG: Ấn phím Menu → Set alarm → Ấn phím OK → Ấn phím  hoặc  để chọn On/Off → OK
4. CHỈNH ÂM BÁO NHỊP TIM: Ấn phím  để tăng âm lượng, ấn phím  để giảm âm lượng
5. CHỈNH ÂM LƯỢNG CẢNH BÁO: Ấn phím Menu → Set Volume → OK → ấn phím  để giảm âm lượng
6. GIỚI HẠN CẢNH BÁO: Ấn phím Menu → Set Alarm → OK → ấn phím , , ,  để di chuyển con trỏ đến ô cần chỉnh(giới hạn trên, dưới của SpO₂ và PR nhịp tim)
7. DISCOLOR TIME - chống cảnh báo giả: Ấn phím Menu → Set SpO₂ → OK → Discolor time → OK → ấn phím ,  để chọn thời gian báo động
8. THÔNG TIN BỆNH NHÂN: Ấn phím Menu → Patient Info → OK → Chọn Số giường bệnh nhân (Bed), Giới tính(Sex), Đối tượng bệnh nhân(Sơ sinh, trẻ em, người lớn)
9. SET TIME/CÀI ĐẶT THỜI GIAN: Ấn phím Menu
10. SET TRENDS/ TREND DỮ LIỆU: Ấn phím Menu
11. SET HOSPITAL LIST/ DANH SÁCH BỆNH VIỆN
12. DATA OUTPUT/ TRUY XUẤT DỮ LIỆU
13. SET LANGUAGE/ CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ
14. RESET SETTINGS/ KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC
15. SYSTEM INFO/ THÔNG TIN THIẾT BỊ



Dương Thanh Huy

GIAM ĐỐC