








HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY ĐO SpO₂ ĐỂ BÀN SOLARIS - Model: NT2A

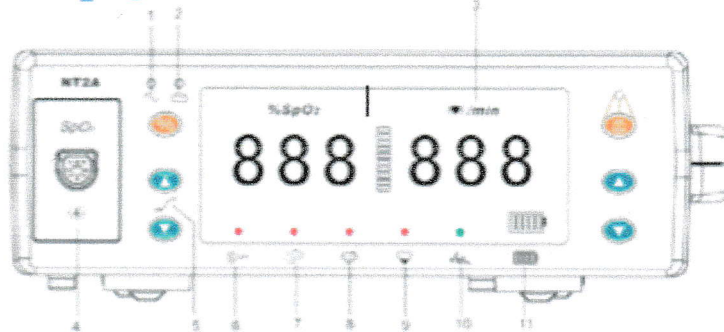

1. Đèn báo nguồn AC
2. Đèn báo sử dụng Pin
3. Nhịp tim
4. Tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601-1
5. Cài đặt giới hạn cảnh báo
6. Chưa kết nối sensor
7. Mắt kết nối với bệnh nhân
8. Dò nhịp tim
9. Độ tuổi máu thấp
10. Nhiều đo cử động
11. Báo sạc Pin và hiển thị mức Pin

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG:

-  **Phím nguồn:** Ấn và giữ để Mờ/ Tắt thiết bị
-  **Tắt báo động.** Ấn lại để mở báo động. Ấn giữ trong 3 giây để chỉnh âm lượng báo động bằng phím Tăng/ Giảm
-  **Tăng giá trị cài đặt/ Tăng âm lượng nhịp tim**
-  **Giảm giá trị cài đặt/ Giảm âm lượng nhịp tim**
-  **Cài đặt mức cảnh báo trên của SpO₂ và Nhịp tim**
-  **Cài đặt mức cảnh báo dưới của SpO₂ và Nhịp tim**



Đặng Thanh Huy

GIAM ĐỐC