

HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH

100% TỰ NHIÊN

NƯỚC BIỂN ƯU TRƯƠNG 2.3%

DẠNG XỊT LÀM SẠCH RÁY TAI 100% TỰ NHIÊN
DUNG DỊCH NƯỚC BIỂN ƯU TRƯƠNG



Sinomarin® EAR CARE là sản phẩm xịt, làm sạch ráy tai 100% tự nhiên. Thành phần là dung dịch nước biển ưu trương (2.3% NaCl), giàu các chất có lợi từ nước biển (khoáng chất và các nguyên tố vi lượng), làm sạch ống tai bằng cách nhẹ nhàng lấy đi các ráy tai dư thừa và phá vỡ độ dính của nó. Thường xuyên sử dụng sản phẩm **Sinomarin® EAR CARE** sẽ giúp ngăn chặn sự tích tụ của ráy tai và đảm bảo việc vệ sinh tai được tốt nhất.

Sinomarin® EAR CARE là dạng thuốc xịt có phân liều dung tích 30ml, giúp đảm bảo đưa lượng thuốc thích hợp vào bên trong tai. Ngoài ra, vòi xịt được thiết kế với kiểu dáng an toàn giúp tránh đưa vòi xịt quá sâu vào trong ống tai, đảm bảo dung dịch được phun nhẹ nhàng vào thành ống tai và loại trừ nguy cơ chấn thương tai. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em vì tai của trẻ khá nhạy cảm.

Nước biển sử dụng trong **Sinomarin® EAR CARE** được lấy từ vịnh Cancale, bờ biển Brittany của Pháp. Khu vực này nổi tiếng với các vùng biển rộng và các dòng thủy triều mạnh. Nhờ đó tạo thành nước biển có chất lượng đảm bảo. Nước ở đây được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng của Pháp và đạt những tiêu chuẩn do Bộ Y tế Pháp đề ra.

Sinomarin® EAR CARE 100% tự nhiên; không có chất thuốc, không chất bảo quản và không chất phụ gia.

Đặc điểm:

- Làm sạch ống tai an toàn, tự nhiên và hiệu quả.
- Phá vỡ và đào thải ráy tai tích tụ bên trong tai.
- Ngăn ngừa sự tích tụ ráy tai.
- Có thể sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các thuốc làm mềm, loại bỏ ráy tai khác.

Chỉ định:

- Dùng để vệ sinh tai thường xuyên.
- Loại bỏ sự tích tụ ráy tai và ngăn chặn ráy tai hình thành trở lại (Ví dụ: người già và trẻ em).
- Vệ sinh tai thường quy cho các đối tượng sử dụng máy trợ thính và tai nghe.
- Cải thiện thính lực do màng nhĩ bị ngăn trở bởi ráy tai.
- Làm sạch tai hoàn toàn trước khi thăm khám và làm khuôn tai cho bệnh nhân bị điếc.

Chống chỉ định:

Không sử dụng trong các trường hợp sau: phẫu thuật tai trước đó; màng nhĩ không còn nguyên vẹn; kết cấu ống tai khác thường gây giữ nước; nhiễm trùng tai như viêm tai; tuôn nước nhầy; có vật thể lạ trong tai; hội chứng Ménière; các hình thức hoa mắt; chóng mặt; tiền sử về bệnh tai.

Khuyến cáo: Trường hợp ráy tai ảnh hưởng nghiêm trọng nên được loại bỏ bởi bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.



Thành phần: nước biển 70%, nước tinh khiết 30%, tương đương với 23 g/L NaCl (2.3%). Không chất bảo quản, không chất thuốc, không chất phụ gia. 100% tự nhiên.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Nhẹ nhàng đưa vòi xịt vào tai và giữ đầu thẳng, nhấn vòi xịt 1- 2 lần.
2. Mát-xa tai trong khoảng 10 giây.
3. Nghiêng nhẹ đầu cho dịch chảy ra và lau khô bên ngoài tai.
4. Rửa sạch vòi xịt với nước ấm và lau khô sau mỗi lần sử dụng.
5. Lặp lại cho tai còn lại nếu cần.

Liều dùng :

Sử dụng từ 2 đến 3 lần trong 1 tuần cho mỗi bên tai, hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Trong trường hợp ráy tai tích tụ nhiều thì nên dùng mỗi ngày.

Thận trọng: Chỉ dùng cho tai. Chỉ sử dụng cho cùng một người và không dùng cho người khác. Không dùng quá hạn sử dụng. Giữ xa tầm tay của trẻ em.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25 °C. Tránh ánh nắng mặt trời.

Sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Sản phẩm Sinomarin® là thiết bị y tế có chứng nhận CE, đáp ứng các tiêu chuẩn theo Chỉ thị 93/42 của liên minh châu Âu.

Sinomarin® là dòng sản phẩm dung dịch nước biển ưu trương đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho mọi lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến người lớn:

CHĂM SÓC TAI

- **Sinomarin® EAR CARE Children 30 ml**
Dạng bơm xịt siêu nhẹ với vòi xịt êm ái và an toàn cho trẻ trên 3 tuổi.
- **Sinomarin® EAR CARE Adults 30 ml**
Dạng bơm xịt với vòi xịt êm ái và an toàn cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

CHĂM SÓC MŨI

- **Sinomarin® Babies 5 ml**
Dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- **Sinomarin® Children 100 ml**
Dạng phun sương nhẹ với vòi xịt an toàn cho trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi và trẻ em.
- **Sinomarin® Adults 125 ml**
Dạng phun sương cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.
- **Sinomarin® ENT 200 ml**
Dạng xịt cho người lớn và trẻ em trên 10 tuổi.
- **Sinomarin® Mini Spray 30 ml & 50 ml**
Dạng bơm cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh trên 6 tháng.

Sinomarin® đã được đăng ký và bảo hộ bởi Gerolymatos International S.A., E.U.

